

機械器具 22 検眼用器具

一般医療機器 細隙灯顕微鏡 35148000

ハンスリットランプ TYPE-A

【警告】

・ハンスリットランプの使用中には、眼内に直接光を照射しないこと。

・最大光量で70秒以上眼に照射しないこと。

・ハンスリットランプを使用する前に、必ず取扱説明書をよく読み正しく使用すること

・ハンスリットランプが落下、破損した場合は、直ちに使用を中止し、修理または点検を行うこと。

【禁忌・禁止】

・ハンスリットランプは、診断目的以外で使用しないこと。

・ハンスリットランプの分解、修理、改造をしないこと。

・ハンスリットランプを水や湿気の多い場所に置かないこと。

・ハンスリットランプを火気の近くに置かないこと。

・ハンスリットランプを直射日光のあたる場所に置かないこと。


・ハンスリットランプに撃を与えないこと。

・電池は指定した電池を使用すること。

【形状・構造及び原理等】

各部の詳細は取扱説明書をご参照ください。

寸法：本体116 (W) × 238 (D) × 210 (H) mm

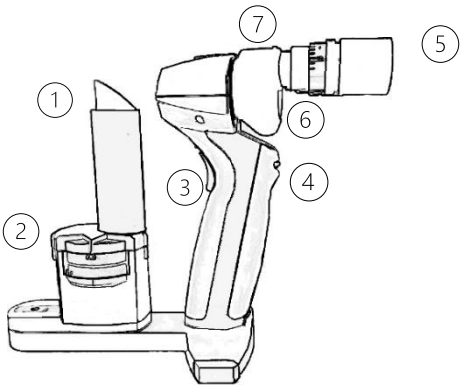

- ① スリット光照射部
- ② スリット幅調整/色温度フィルター調整機構
- ③ 照明ON/OFFスイッチ
- ④ 調光ノブ
- ⑤ 接眼レンズ
- ⑥ 変倍装置
- ⑦ デジタルカメラ取付位置（オプション）

	型 式	倍 率
I	ハンディースリットランプ HSL-A	10 倍および 16 倍

<電氣的定格、使用環境等>

電源電圧：AC アダプタ：AC100V 50/60Hz

本体：DC3V消費電力：6VA

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器電撃に対する保護の程度による分類：B 形装着部

<原理>

眼球に細隙光を投射し、その反射面を観察する。

【使用目的又は効能】

様々な照明系を用いて眼球等の観察、検査に使用する。

【使用方法等】

1. ハンスリットランプのスイッチを入れます。

2. ハンスリットランプの明るさを調整するために、調光ノブを回します。

3. レンズを調整するために、レンズホルダーを回します。

4. 検査対象の部位にハンスリットランプの光を当て、必要に応じて角度を調整します。

5. 使用が終わったら、ハンスリットランプのスイッチを切ります。

6. 電源アダプターとハンスリットランプのケーブルを巻き、ランプを保管する場所に置きます。

7. 必要に応じてスリットランプを充電します。

【使用上の注意】

1. 【形状・構造及び原理等】欄に記載された使用環境以外で使用しないでください。

2. 修理が必要な場合、下記の製造販売業者に依頼してください。
落下あるいは衝撃により故障した場合、必ず修理を行ってから使用してください。

3. 本装置が水平に且つ安定に設置されていることを確認し、使用してください。

4. 可燃性物質の近傍や酸素濃度の高い環境での使用はしないでください。ご使用前に本装置に異常がないか点検してください。

5. 電磁干渉が起り得る機器の近傍で使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境：温度5℃～40℃、湿度 10～80%、気圧 760～1060hPa

2. 本品は、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

3. 本品に医療従事者以外の者が触れないよう適切に保管・管理すること。

【取扱い上の注意】

クリーニングを行う際は電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。

【保守・点検に係る事項】

1. 本装置の表面（光学系以外）をクリーニングする際は、2%の中性洗剤液または75%イソプロピルアルコールを含ませた布で、内部に液体が侵入しないように拭いてください。また水分が残っている場合、乾拭きしてください。

2. 使用中に電球の交換が必要になった場合には5分間放冷したのちに行ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者（お問合せ先）

株式会社 Picture Technology 東京営業所

〒184-0004東京都小金井市本町 2-20-15-202

（電話番号）（代表）03-6899-3759