

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDN:70976000)

ヒューネット ニトリルグローブ検査検診用

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ニトリルゴム製、未滅菌、左右兼用、粉なし（パウダーフリー）の検査・検診用手袋である。

本品は、一回限りの使用で、再使用できない。

〔主寸法〕

掌幅：SS=76/S=84/M=94/L=105/LL=113(±10)mm

全長：240mm 以上

厚み：0.05mm 以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- 本品を使用中に、製品が破損、汚損、その他異常（ピンホール等）が認められる場合は、直ちに使用を中止すること。
- 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- 火、熱、熱湯等の熱源に直接触れないこと。
- 薬品や溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。
- 使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法：水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器、オゾン発生装置等に近づけないこと。
- 使用期限：包装材に記載の通り。

【製造販売業者及び製造業者の指名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヒューネット

愛媛県松山市和泉南 6-4-26

電話：089-969-6710

製造業者：Top Glove Sdn.Bhd.（マレーシア）