

機械器具（21）内臓機能検査用器具
心電計ケーブル及びリード（JMDN コード 35562010）
一般医療機器

R T 3 4 用 ク リ ッ プ C E - 0 4

*【禁忌・禁止】


- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI 検査）と併用しないでください。
[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、電極（ECG ディスポーザブル電極 RT-34）と、誘導コードとを中継する器具です。

形状

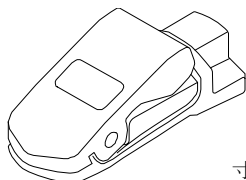

寸法 13 mm×34 mm×26 mm

原理

電極接続部と誘導コード接続部は、1 枚のステンレス鋼板でつながっています。心電用電極と誘導コードとを中継し、患者の体表面に装着した心電用電極から得られた心電図信号を、心電計に伝達します。

* 仕様

導通抵抗（導線部）：5 Ω 以下

*【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置です。

*【使用方法等】

- ・本品を誘導コードのチップ部（電極接続部）に差し込みます。
- ・患者の体表面に装着したディスポーザブル電極に、本品を挟み込むようにして接続します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・誘導コードのチップ部以外への接続は、行わないでください。
[重大な事故の原因となることがあります。]

* 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

* 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI）	使用禁止	誘導起電力により局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。 また MRI 装置への吸着があります。

*【保管方法及び有効期間等】

* 保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

温度範囲-10～50℃

湿度範囲 10～95%

耐用期間

本製品は消耗品です。
使用状況により耐用期間に差異が生じます。

【保守・点検に係る事項】

* 洗浄・消毒

使用後は、中性洗剤または 70%イソプロピルアルコールで清拭してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



FUKUDA M-E KOGYO CO., LTD.
フクダ エム・イー工業 株式会社
千葉県流山市南流山 6-26-8
電話番号 04-7158-9020