

A/B 切換器用接続コード CJE-05RS

【禁忌・禁止】


*併用医療機器

- ※※ 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
[MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
- ※※ 高圧酸素患者治療装置内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
- ※※ 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」

【形状・構造及び原理等】

形状

1. CJE-05RS1
 - ・コードの長さ：約 1.0m
 - ・質量：約 75 g

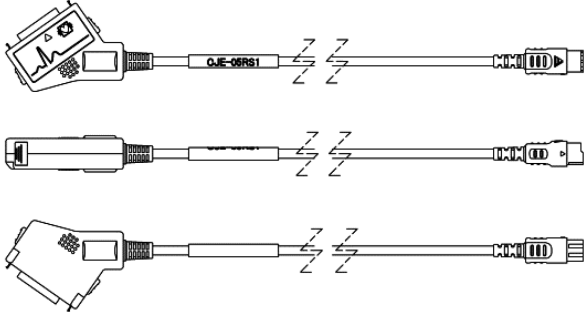

※※作動・動作原理

※※ 本製品は、体表面につけた電極を接続し、心臓の活動電位（1mV 程度の微弱な電圧）を伝送する導線です。患者の心電図信号を心電波形処理装置（波形グラフで表示する）に伝達します。この活動電位を記録する一般的な装置は心電計（ECG）であり、本製品は主に安静時心電図検査で使用する装置です。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達することを目的とします。

【使用方法等】

1. 丸型コネクタを A/B 切換器の心電計接続用コネクタに接続します。
2. 角型コネクタを心電計の誘導コネクタに接続します。
3. 心電図を収録します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ※※ 指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
[本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。]
- * 長時間測定する場合、コードが患者および被検者の体を圧迫していることが無いことを適宜確認してください。
[血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。]

- * コードを強くねじらないでください。コードを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。
[断線や破損の恐れがあります。]
- ※※ * コードの上にもものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。
[断線や破損の恐れがあります。]
- ※※ * 長時間測定する場合、本製品が患者および被検者の体の下に配置されないようにしてください。
- * 本製品は滅菌できません。
- * 本製品は防水仕様ではありません。

*相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	※※MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。
高圧酸素患者治療装置	使用禁止	※※爆発または火災が起こる恐れがあります。
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	使用禁止	※※爆発または火災が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- * 直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。
- ・保管温度：-10～50℃
- ・湿度：10～95%RH（結露しないこと）

耐用期間

2 年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- * 使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- ※※ * 本製品使用後は、中性洗剤または 70% イソプロピルアルコールで拭き、シンナー、トルエンなどの有機溶剤やクレンジング剤等は使用しないでください。
[コード被覆の劣化を促進し、断線や破損の恐れがあります。]
- ※※ * コードを拭く際は、コネクタ等からコードを引っ張るようには拭かず、コードを握って拭いてください。
[断線や破損の恐れがあります。]
- * 拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号：03-3815-2121（代）