

心電中継コード CIO-08

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。

〔MRI 装置に吸引される恐れがあります。また、誘導起電力による局所的な発熱で被検者が熱傷を負うことや、本装置の本来の性能を損なう可能性があります。〕「相互作用の項参照」


使用方法

1. 清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
〔指定外の薬品等による清掃は、ケーブル被覆の劣化を促進し、破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はケーブル被覆の劣化を促進します。〕
2. ケーブルを患者の首に巻きつけるような配置にしないでください。
〔ケーブルが首に巻きつき、患者の生命及び健康に影響を与える恐れがあります。〕
3. コネクタ部や中継部を持たずに、ケーブルの抜き挿しをしないでください。
〔断線の恐れがあります。〕

【形状・構造及び原理等】

構成部品と種類

本製品は、導線を通して患者の心電図信号を機器本体に伝達するための中継コードです。

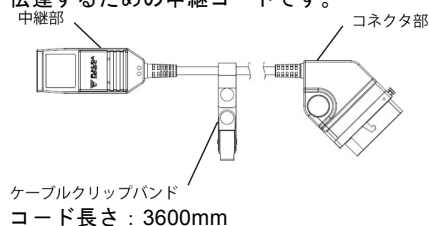

No.	型 式	備 考
1	CIO-08CTP-3EU	*3 電極タイプ（電気メス対策用）
2	CIO-08CTP-5EU	*5 電極タイプ（電気メス対策用）

動作保証条件

使用温度：10～40℃

使用湿度：30～85%（結露なきこと）

作動・動作原理

導線を介して患者の心電図信号を機器本体に伝達します。

【使用目的又は効果】

性能

項目	仕様
導通抵抗	200～600Ω
耐電圧	AC1000V

使用目的

- * 患者の心電図信号を機器本体に伝達するための中継コードとして使用します。手術室など電気メス利用環境下で使用します。

【使用方法等】

使用方法

1. 本製品の中継部に誘導コードを接続します。
2. 本製品のコネクタ部を機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を測定します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本製品を用いてインピーダンス呼吸を測定することはできません。
2. “”マークは取扱説明書に助言が記載されていることを示します。本製品を接続する機器の取扱説明書に従って使用してください。
〔重大な事故の原因となることがあります。〕
- *3. 指定の機器以外、接続しないでください。本製品を接続する機器の取扱説明書を確認、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
〔本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。〕
- *4. 本製品を用いて長時間測定する場合、ケーブルが患者の体の下に配置されないようにしてください。また、ケーブルが患者を圧迫していないことを適宜確認してください。
〔血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。〕
5. ケーブルを強くねじらないでください。ケーブルを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。
〔断線や破損の恐れがあります。〕
6. ケーブルの上にものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。
〔断線や破損の恐れがあります。〕
7. 破損（キズ、はがれ、変形等）した製品は使用しないでください。
〔傷害を負ったり、物的損害の恐れがあります。〕

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	磁気による吸引、磁気による誘導起電力

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

保管温度：-10～60℃

保管湿度：10～95%（結露なきこと）

耐用期間・使用期間

耐用期間：2 年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

*動作

- * 使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。

*外観

- * 使用前に本製品に損傷が無いことを確認してください。

*清掃

- ・本製品使用後は、中性洗剤または 70%イソプロピルアルコールで拭いてください。
- ・ケーブルの清掃は、ケーブル部を持って拭いてください。
〔コネクタ部や中継部を持ってケーブルを引っ張ると断線する恐れがあります。〕
- ・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。
- ・蒸気、EOG 等の滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121(代)