

## クリアローデTE-172

### 再使用禁止

#### \*【禁忌・禁止】

##### 適用対象（患者）


\*\*・新生児および低出生体重児へ使用しないでください。  
[本品は、新生児および低出生体重児にはサイズが対応していないことから電極同士が重なる恐れがあるため使用できません。]

##### 使用方法

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 構成部品と種類

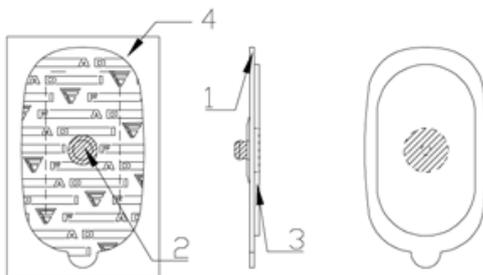

No.	名称
1	粘着フォーム
2	電極
3	電解質
4	ライナー

##### 種類

- ・TE-172

##### 作動・動作原理

体表面に設置し、体表面の心電信号を心電波形処理装置（心臓の活動電位（1mV 程度の微弱な電圧）を波形グラフで表示する）に伝達する導体である。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）である。本品は単回使用である。

#### 【使用目的又は効果】

##### 使用目的

本品は体表に設置し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体である。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

##### 使用方法

1. ECG モニタリングおよび検査手順に従って、電極の貼付部位を選択し、皮膚の前処理をしてください。
2. 皮膚の前処理は、電極の貼付部を清潔にし乾燥させ、脂分を取り除いてください。体毛が多く濃いまたはカールしていると、電極の貼付の妨げになりますので、除毛してください。
3. 本品の包装をあげ、電極を取り出します。
4. ライナーから電極を剥がし、前処理した皮膚上に乗せて、空気がはいらぬよう人差し指で上から円を描くように押さえて肌に密着させます。中心部を強く押さないように注意してください。
5. 患者に電極を貼付した後、リード線を電極に接続します。
6. 電極を剥がす際は、皮膚の損傷を最小限に抑えるために、電極の端よりゆっくりと剥がしてください。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- \*\*・使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- \*・除細動を行う時は、装着した電極から離れた箇所に除細動器のパドルを当ててください。除細動器のパドルが電極に触れると、放電エネルギーにより熱傷が起こります。
- ・皮膚障害のある部位への装着は行わないでください。
- ・使用中皮膚に発赤、腫れなどの症状が現れたときは使用を中止してください。
- \*・電極装着中は、装着部位が圧迫されないように監視をしてください。[患者の状態等により、装着部位に圧迫壊死を生じることがあります。]
- \*\* \*・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。[本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。]
- \*・万が一、誤飲されますと体内で滞留する可能性があるため、取扱いに注意してください。
- \*\*・本品で長時間測定する場合、患者コード類が患者の下に配置されないようにしてください。
- \*\* \*・使用する際は、アルミ包装に記載されている使用期限を確認してください。
- ・アルミ包装を開封した後は、ゲルが乾燥しやすいので早めにご使用ください。
- \*\*・皮膚処理後は、皮膚が乾燥しているのを確認して、電極を貼ってください。[電極はがれの原因となります。]
- ・他の型式の電極と一緒に使用すると、安定した波形を得られないことがあります。
- \*・本品は、滅菌できません。
- ・MRI 装置でご使用になる場合、電磁波の影響により電極部分が発熱し、患者が火傷することがあります。MRI 装置の取扱説明書を熟読し正しくお使いください。なお、MRI 装置（心電同期）にご使用の場合、事前にMRI 装置製造元にご確認ください。中継コードおよび誘導コードは必ず MRI 装置製造元が供給する専用リード線をご使用ください。
- ・MRI 検査でご使用後、TE-172 を引き続きお使いの場合は、新しいものに取り換えてください。

##### \*妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- \*\*・本品は、新生児および低出生体重児にはサイズが対応していないことから電極同士が重なる恐れがあるため使用できません。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

- ・直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、涼しい場所に保管してください。
  - ・特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には放置しないでください。
  - \*\*・アルミ包装を開封した後は、残りの電極が空気に触れて乾燥しないよう、アルミ包装の端を折って保管してください。折り曲げをテープで留めるとより有効です。
- 保管温度： 0～30℃

##### 使用期限

アルミ包装に記載

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
 フクダ電子株式会社  
 電話番号:03-3815-2121(代)