

ホルタ用中継アダプタ CIH-09


【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
[MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
- ・高圧酸素患者治療装置内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
- ・可燃性麻酔ガスおよび高酸素濃度雰囲気内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」
- ・除細動器と併用しないでください。
[放電エネルギーによる電撃により本製品が破損したり、除細動対象患者へのエネルギー印加不足など本来の性能を損なう可能性があります。]「相互作用の項参照」
- ・電気手術器（電気メス）と併用しないでください。
[電気メスからの電流が電極に流れることにより、患者が熱傷を負うことや、本製品の本来の性能を損なう可能性があります。]「相互作用の項参照」

【形状・構造及び原理等】

形状

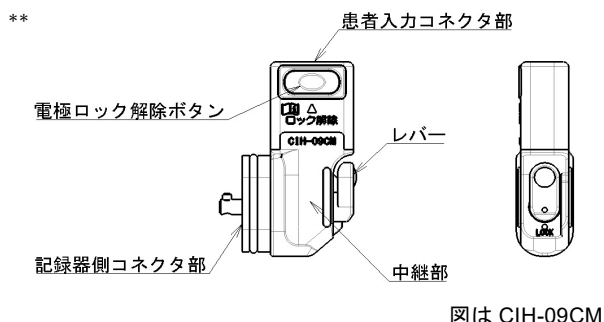

型式	備考
CIH-09CM	ホルタ心電計双極 2ch エクセローデ W、エクセローデ T 用 内携帯用

作動・動作原理

体表面に貼り付けられた電極から得られた心電図信号を心電図波形処理装置に伝達する導体です。この活動電位を記録する一般的な装置は、ホルタ心電計です。

動作保証条件

使用温度：10～45℃

使用湿度：10～95% RH（結露しないこと）

但し、入浴時を除きます。浴槽入湯またはシャワー入湯時は 40℃以下の水温で連続 10 分以内としてください。


【使用目的又は効果】

使用目的


本製品は、ホルタ心電計等に接続して心電図信号を伝達するための装置です。

【使用方法等】

1. 本製品の記録器側コネクタ部をホルタ記録器のコネクタ部に接続します。
2. レバーを回しロックします。

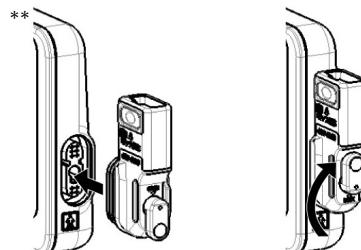

3. 本製品の患者入力コネクタ部に電極を奥まで接続しロックします。

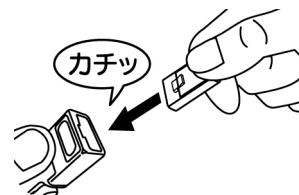

4. 患者に電極を取り付け、心電図を記録します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- **・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。]
- ・長時間測定する場合、本製品が押さえつけられ、患者を圧迫していることが無いことを確認してください。
[血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。]
 - ・本製品は、滅菌できません。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	*併用不可	MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。
高圧酸素患者治療装置	*併用不可	爆発または火災が起こる恐れがあります。
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	*併用不可	爆発または火災が起こる恐れがあります。
除細動器	*併用不可	破損、除細動対象患者へのエネルギー印加不足が起こる恐れがあります。
電気手術器（電気メス）	*併用不可	熱傷が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、指定温度範囲内の場所に保管してください。特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には放置しないでください。

- ・保管温度：-10～60℃

耐用期間

2 年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- *・清掃は当社指定の医療機器清拭クロス（OAZ-10S または OAZ-10L）で拭いてください。もしくは、消毒用アルコール（エタノール、イソプロピルアルコール）をガーゼや脱脂綿等に含ませて固くしぼり、本装置を拭いてください。
- *・拭いた後に医療機器清拭クロスの液状成分が残っている場合は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
[表面の樹脂を損傷させ、変色や傷、故障や劣化の原因となることがあります。]
- ** *・医療機器清拭クロスや消毒用アルコール（エタノール、イソプロピルアルコール）を含んだガーゼ、脱脂綿等でコネクタの端子の周囲は清拭しないでください。
[故障の原因となることがあります。]
- *・化学ぞうきん、タワシ、金属タワシ、研磨剤、磨き粉、熱湯、薬品（クレンザー、シンナー、トルエン、ベンジン、ベンゾール、住宅用/家具用合成洗剤）、強酸性の薬剤、溶剤（揮発性、有機系）や油脂を含むクリーナー類、鋭利な工具等を使用しないでください。
[表面の樹脂を損傷させ、変色や傷、故障や劣化の原因となることがあります。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121(代)