


ホルタ用中継コード CIH-12

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- ※・磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）と併用しないでください。
[MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]
「相互作用の項参照」
- ※・高圧酸素患者治療装置内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]
「相互作用の項参照」
- ※・可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内で使用しないでください。
[爆発または火災が起こる恐れがあります。]
「相互作用の項参照」
- ※・除細動器と併用しないでください。
[放電エネルギーによる電撃により本製品が破損したり、除細動対象患者へのエネルギー印加不足など本来の性能を損なう可能性があります。]
「相互作用の項参照」
- ※・電気手術器（電気メス）と併用しないでください。
[電気メスからの電流が電極に流れることにより、患者が熱傷を負うことや、本製品の本来の性能を損なう可能性があります。]
「相互作用の項参照」

【形状・構造及び原理等】

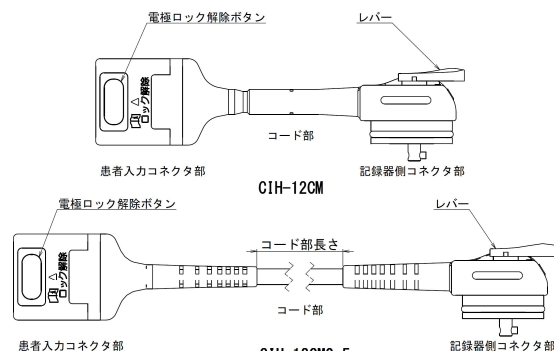

型式	備考
CIH-12CM	ホルタ心電計 3ch 腹部携帯用
CIH-12CM0.5	ホルタ心電計 3ch コード部長さ 約 50cm

作動・動作原理

体表に貼り付けられた電極から得られた心電図信号を心電図波形処理装置に伝達する導体です。この活動電位を記録する一般的な装置は、ホルタ心電計です。

動作保証条件

使用温度：10～45℃
使用湿度：10～95%RH（結露しないこと）
但し、入浴時を除きます。浴槽入湯またはシャワー入湯時は40℃以下の湯温で連続10分以内としてください。


【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は、患者の心電図信号をホルタ心電計等に伝達するための装置です。

【使用方法等】

1. 本製品の記録器側コネクタ部をホルタ心電計のコネクタ部に接続します。
2. レバーをLOCKの位置に回しロックします。
3. 本製品の患者入力コネクタ部に電極を奥まで接続しロックします。

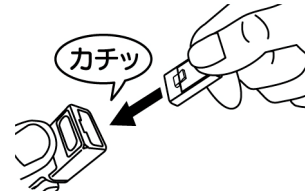

- ※4. 患者に電極を取り付け、心電図を記録します。
5. 記録が終了し、電極を取り外すときは、電極ロック解除ボタンを押しながら患者入力コネクタ部をしっかりと持ち、電極のコネクタをまっすぐ引き抜いてください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ※・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
[本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。]
- ※・本製品は指定のフクダ電子製ホルタ心電計、電極との組み合わせにより入浴が可能です。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
- ※・入浴時、浴槽につかる際は湯温40℃以下、10分以内としてください。高温で長時間浴槽につかるとノイズの原因となります。
- ※・サウナ、ジャグジーバス、入浴剤を入れた浴槽、温泉では使用しないでください。誤作動の原因となります。
・本製品をねじったり、無理な力を加えたりしないでください。
[断線や破損の恐れがあります。]
・測定時には中継コード、機器、電極等が押さえつけられ、体を圧迫していないことを適宜確認してください。
[血流を障害し、圧迫壊死が生じることがあります。]
・本製品は、滅菌できません。

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）	使用禁止	※MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります
高圧酸素患者治療装置	使用禁止	爆発または火災が起こる恐れがあります
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	使用禁止	爆発または火災が起こる恐れがあります
除細動器	使用禁止	破損、除細動対象患者へのエネルギー印加不足が起こる恐れがあります
電気手術器（電気メス）	使用禁止	熱傷が起こる恐れがあります

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、指定温度範囲内の場所に保管してください。特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には放置しないでください。

- ・保管温度：-10～60℃

耐用期間

2 年　〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

- * ・患者に電極装着後、心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- ・本製品使用後は、中性洗剤または 70%イソプロピルアルコールで拭いてください。シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
フクダ電子株式会社
電話番号：03－3815－2121(代)