

電 子 コ ン ベ ッ ク ス プ ロ ー ブ F U T - V M 1 2 1 - 6 5 A

【警告】

- ・可燃性麻酔ガスなどを使用している場所に設置しないこと。
[爆発や火災の恐れがあります。]
- ・本品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニューレの操作を慎重に行うこと。
[電気手術器のニードルカニューレを本品に挿入する際及び本品に沿って出し入れを行う際、ニードルカニューレ上の絶縁皮膜を破損させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こす可能性があります。]

【禁忌・禁止】

- ・眼球には使用しないこと。
[超音波出力により、眼球を損傷する恐れがあります。]
- ・天然ゴム（ラテックス）製のプローブカバーを使用する場合には、アレルギーのある患者には使用しないこと。
[天然ゴムは、希にアレルギー症状を起こすことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

<構成>

- ・プローブ本体
- ・医療機器添付文書（付属品）
- ・保証書（付属品）
- ・ラバーブーツ（プローブカバー）
- ・ラバーブーツ止め輪ゴム


<原材料>（体に接触する部分）

名 称	材 料
プローブカバー	天然ゴム（ラテックス）
穿刺金具	ステンレススチール

（体に接触する可能性のある部分）

名 称	材 料
シリコンレンズ	シリコンゴム
ケース	ポリアセタール樹脂、ポリウレタン、 又は変性ポリフェニレンオキシド

<外観図、寸法及び質量>

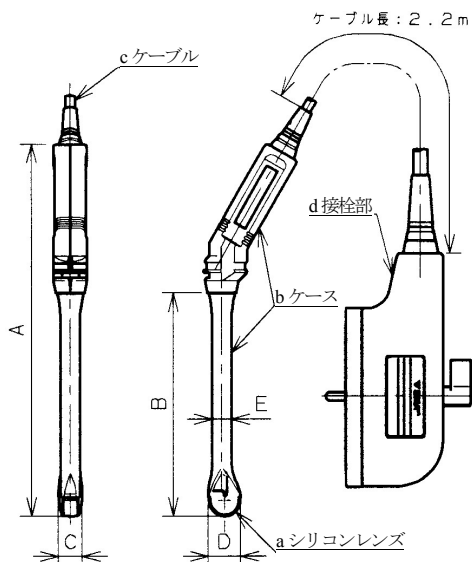

1)各部名称

番号	名称
a	シリコンレンズ
b	ケース
c	ケーブル
d	接続部

2)寸法及び質量

A	B	C	D	E	質量
304 mm	182.2 mm	19.5 mm	27.4 mm	15 mm	0.70kg (ケーブル、接 栓部を除く)

(寸法、質量の公差は記入数値の±10%以内)

<電撃に対する保護の形式と程度>

- ・保護の形式 : クラス I
- ・保護の程度 : BF 形装着部

<作動・動作原理>

1. 探触子の振動子へ送信器から電気パルス信号を加えると、振動子は電気振動を機械振動エネルギーに変換する働きをし、振動子に接する生体または、液体などの媒質中に超音波を発射します。
2. 振動子は、超音波反射波の受信にも使用されます。振動子は、超音波振動によって機械的に振動し、機械電気変換作用によって電気エネルギーに変換する働きをして受信します。
3. 振動子が多数配列されているために、電氣的に超音波パルス信号の操作を繰り返し行い、それによって反射受信信号を実時間で観察することができます。
4. 超音波の送信では、パルス法を応用した超音波診断装置により百万分の 1 秒程度のきわめて短時間だけ断続的に超音波を発生させます。
5. 断層用の分解能を良くするために、接続された超音波診断装置内では、電子フォーカスシステムを採用しています。

【使用目的、効能又は効果】

本プローブを適合する超音波診断装置に接続し、経腔的に体腔内及び、その他の部位を検査する。


【品目仕様等】

項 目	仕様
総合感度	JIS T 1507 8.3.6 項、実験片の上から 3 本目の線反射体のエコーが確認できること。
分解能	モード 距離 方位 B 2mm 以下 3mm 以下 M 2mm 以下 7mm 以下
超音波周波数	・ 6.5MHz ± 20%
超音波出力	10mW/cm ² 以下であること。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件
次の条件を満たしている環境下で使用してください。
 - ・周囲温度: 10~40℃
 - ・相対湿度: 30~75% (結露なきこと)
2. 使用方法
1) プローブを当該超音波画像診断装置の所定の接続部へ接続する。

- 2) 当該超音波画像診断装置の操作方法に従って適切な動作状態に調節する。
- 3) 超音波放射部にエコーゼリーを適量塗布し、プローブに滅菌されたプローブカバーを取り付ける。

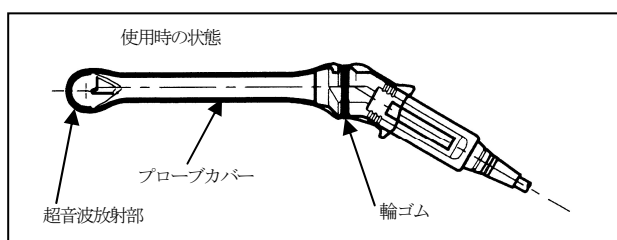

- 4) また、穿刺針使用時は滅菌された穿刺ガイドホルダーをプローブカバーの上からプローブに取り付ける。
- 5) 体腔内に挿入し、観測を行う。

その他詳細は、FUT-VM121-65A 取扱説明書「3. 使用方法」を参照してください。

3. 使用後

洗浄・滅菌を行う。方法はFUT-VM121-65A 取扱説明書「4. 手入れ（洗浄、消毒、滅菌）」を参照してください。

4. 接続可能な機器等

以下の機器に接続することができます。

販売名：超音波診断装置 FF ソニック UF-5500

認証番号：20500BZZ00209000

製造販売業者：フクダ電子株式会社

販売名：超音波診断装置 FF ソニック UF-5600

承認番号：21000BZZ00716000

製造販売業者：フクダ電子株式会社

以下の穿刺金具を接続することができます。

販売名：穿刺金具 経膈用 FUT-PVG2-16

製造販売業者：フクダ電子株式会社

販売名：穿刺金具 経膈用 FUT-PVG2-18

製造販売業者：フクダ電子株式会社

【使用上の注意】

1. プローブは滅菌されたプローブカバーに挿入して使用すること。
2. プローブカバーはディスプレイ製品のため、1回限りの使用とすること。
3. プローブは衝撃に弱く、特に体表に接触させる面は損傷しやすいので落としたり、ぶつけたりしないこと。
4. ゼリーは当社指定のものを使用すること。アルコールを含むゼリーの使用により、感度低下や分解能の劣化の可能性があります。
5. ケーブルは強く曲げたり、引張ったりしないこと。断線の可能性があります。
6. プローブ清掃時は、中性洗剤、または水を含ませたガーゼ等で軽く拭く程度にすること。アルコールへの浸漬または、シンナーなどの有機溶剤は使用しないこと。
7. プローブは高温に弱いので、オートクレーブ滅菌、煮沸消毒等の高温を要する消毒滅菌はしないこと。
8. 指定以外の薬品は使用しないこと。
9. 本品のガイド下で電気手術器を使用する際は、使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等がなくスムーズに移動することを確認の上、慎重に操作すること
10. 接続する装置の取扱説明書に記載されている注意事項をよく読んで使用すること。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

1. 保管方法

次の条件を満たしている環境下で保管してください。

- ・周囲温度：-10～60℃
- ・相対湿度：30～85%（結露なきこと）

2. 耐用期間

6年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係わる事項】

・日常点検

プローブを正しく使用するために検査前、検査後に日常点検を実施してください。日常点検の項目は以下のとおりです。

1. ケースに傷、ひび割れ、亀裂、剥離、変形、汚れがないことを目視で確認してください。
2. ケーブル、接栓部に傷、ひび割れ、亀裂、変形、めくれがないことを目視で確認してください。

【包装】

一台単位で梱包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

電話番号：03-3815-2121(代)

製造業者

フクダ電子株式会社