

## 機械器具 21 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

## 特定保守管理医療機器 「生体情報モニタ Accumil N シリーズ」の構成品 スレーブディスプレイ 21.5 インチワイド

### 【形状・構造及び原理等】



本装置は、生体情報モニタ本体に接続することで、モニタ本体の画面表示の複製または独立表示が可能なディスプレイです。USB ケーブルを接続することによりタッチパネル操作も可能となります。

### 構成

- 1.ディスプレイ本体
- 2.AC アダプタ

### 外観図

ディスプレイ本体

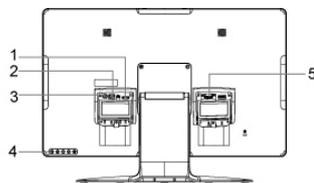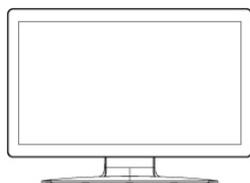

番号	名称	番号	名称
1	HDMI コネクタ	4	電源スイッチ
2	USB ポート	5	VGA コネクタ
3	電源コネクタ	—	—

### AC アダプタ



### 寸法・質量

名称	寸法 WxHxD (mm)	質量 (kg)
ディスプレイ本体	527×384×193	約 6.2

### 電気的定格

AC アダプタ : AC100-240V 50-60Hz 1.6-0.7A

### 装置の保護の分類

電撃に対する保護の形式による分類 : クラス I 機器  
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 : 装着部の無い機器のため規定しない  
 水の浸入又は微粒子状物質の侵入に対する保護の程度の分類 : IPX0

### 動作保証条件

周囲温度 : 0~40°C  
 相対湿度 : 20~80%RH (ただし結露なきこと)

### 付属品

非医療機器

- ・VGA ケーブル
- ・USB ケーブル
- ・DVI-HDMI ケーブル
- ・電源コード

### 【使用目的又は効果】

接続する機器の添付文書を参照してください。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- 1.本装置を適切な位置に設置します。
- 2.本装置と使用する機器を各ケーブルで接続します。
- 3.使用する機器で、本装置の表示モードを設定します。
- 4.本装置の電源を入れ、使用を開始します。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

指定の機器以外、接続しないでください。[正常に動作しない、本来の性能を満たさないなどにより、安全上の問題が生じる恐れがあります。](指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認、または最寄りの販売業者までお問い合わせください。)

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

以下の場所には、設置、保管しないでください。[故障や動作不良の原因になります。]

- ・ほこり、塩分、硫黄などを含んだ空気のある場所
- ・直接日光が長時間当たる場所 (液晶は紫外線で劣化します)
- ・水や蒸気がかかる場所
- ・振動や衝撃がかかる場所
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所

#### 保管条件

周囲温度 : -20~60°C  
 相対湿度 : 10~95%RH (ただし結露なきこと)

#### 耐用期間

使用開始後 5 年 [自己認証 (製造元) による]  
 ただし、定期的な保守点検が行われ、指定した環境で適切に保管および使用された場合の標準的な年数であり、使用状況により異なります。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項 (日常点検)

項目	内容
外観	・機能上問題のある傷、割れ、変形がないこと
付属品	・亀裂や破損、断線がないこと
機能・動作	・各種スイッチ、タッチパネルが正しく機能すること ・バックライトが暗い、波形や文字が不鮮明などの現象が発生していないこと

**接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。**

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フクダ電子株式会社  
電話番号：03-3815-2121（代）

### 外国製造業者

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.  
（中国）  
シンセン マインドレー バイオメディカル エレクトロ  
ニクス カンパニー リミテッド

### 販売業者の連絡先

フクダコーリン株式会社  
カスタマーサポートセンター  
電話番号：0120-088-203

**接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。**