

機械器具 21 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

特定保守管理医療機器 「生体情報モニタ Accumil N シリーズ」の構成品 サテライトモジュールラック 2

【形状・構造及び原理等】

本装置は、モニタ本体のモジュールスロット以外で測定モジュールを使用するためのラックです。
8スロット分のモジュールを装着することが可能です。

構成 外観図



| 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
|----|---------|----|--------------------|
| 1 | ハンドル | 4 | SMR コネクタ 1 (使用しない) |
| 2 | インジケータ | 5 | SMR コネクタ 2 |
| 3 | ケーブルフック | — | — |

寸法・質量

寸法 (mm) : W403×H221×D145
(ハンドル、ケーブルフック含む)
質量 (kg) : 約 2.3
(ハンドル、ケーブルフック含む)

動作保証条件

周囲温度 : 0~40℃
相対湿度 : 15~95%RH (ただし結露なきこと)

【使用目的又は効果】

使用目的

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】

使用方法

1. 本装置を適切な位置に設置します。
2. 本装置と生体情報モニタを専用のケーブルで接続します。
3. 使用するモジュールを本装置のスロットに挿入します。
4. 各モジュールに合わせて、準備を行います。
5. 患者装着部を患者に接続して測定を開始します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

指定の機器以外、接続しないでください。[正常に動作しない、本来の性能を満たさないなどにより、安全上の問題が生じる恐れがあります。] (指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認、または最寄りの販売業者までお問い合わせください。)

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

以下の場所には、設置、保管しないでください。[故障や動作不良の原因になります。]

- ・ほこり、塩分、硫黄などを含んだ空気のある場所
- ・直接日光が長時間当たる場所
- ・水や蒸気がかかる場所
- ・振動や衝撃のかかる場所
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所

保管条件

周囲温度 : -20~60℃
相対湿度 : 10~95%RH (ただし結露なきこと)

耐用期間

設置後6年 [自己認証 (製造元) による]
ただし、定期的な保守点検が行われ、指定した環境で保管および使用された場合です。

【保守・点検に係る事項】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : フクダ電子株式会社
電話番号 : 03-3815-2121 (代)

外国製造業者

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(中国)
シンセン マインドレー バイオメディカル エレクトロニクス カンパニー リミテッド

販売業者の連絡先

フクダコーリン株式会社
カスタマーサポートセンター
電話番号 : 0120-088-203

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。