

特定保守管理医療機器 「生体情報モニタ Accumil N シリーズ」の構成品  
ディスプレイ N22  
ディスプレイ N19

【形状・構造及び原理等】

本ディスプレイは、モニタ本体に接続することで、モニタ本体画面の複製、拡張または独立表示が可能なディスプレイです。また、縦型横型のどちらでも設置することが可能です。


構成

- 1.ディスプレイ本体
- 2.ACアダプタ


外観図

ディスプレイ本体  
・正面、側面、底面

[横型設置]

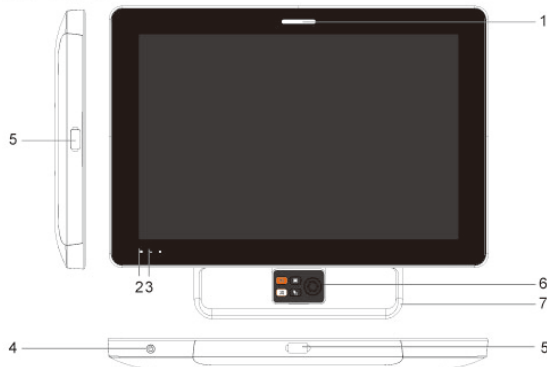


[縦型設置]

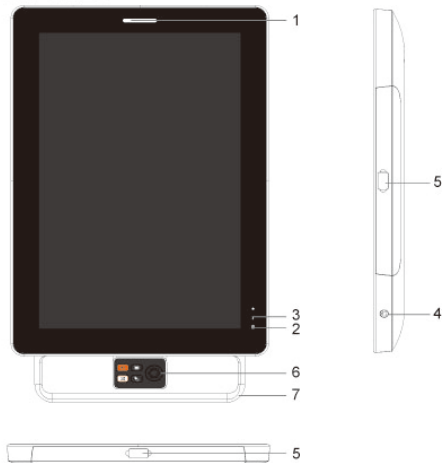

番号	名称	番号	名称
1	アラームランプ	5	USB コネクタ (MSB)
2	バッテリー用インジケータ (常時非点灯)	6	ナビゲーションノブ (オプション)
3	電源用インジケータ	7	ハンドル (オプション)
4	電源スイッチ	—	—

・背面

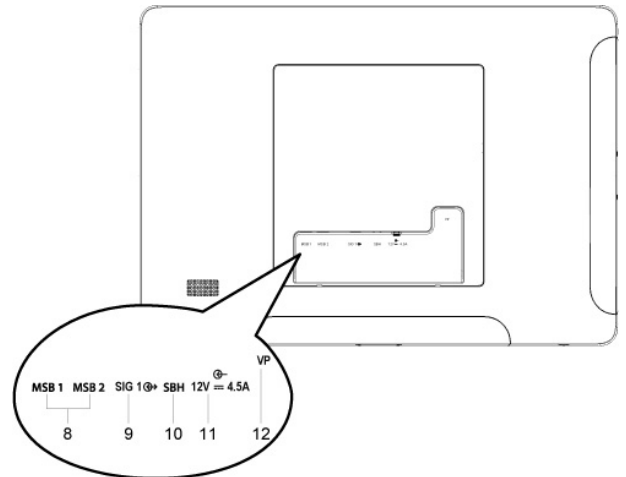

番号	名称	番号	名称
8	USB コネクタ (MSB1、MSB2)	11	電源入力コネクタ
9	信号入力コネクタ (SIG1)	12	画像入力コネクタ (VP)
10	USB ハブコネクタ (SBH)	—	—

ACアダプタ



寸法・質量

名称	寸法 WxHxD (mm)	質量 (kg)
ディスプレイ N19	横型設置：509x348x48 縦型設置：348x509x48 (ハンドル、ナビゲーションノブ含まず)	6.3 (ハンドル、ナビゲーションノブ含まず)
ディスプレイ N22	横型設置：566x383x48 縦型設置：383x566x48 (ハンドル、ナビゲーションノブ含まず)	7.5 (ハンドル、ナビゲーションノブ含まず)

電氣的定格

名称	型式	定格
専用 AC アダプタ	*MDS-060AAS12 B	AC100-250V 50-60Hz 1.5-0.75A
	*MEA-065A12 C	*AC100-240V 50-60Hz 1.5-0.75A

接続する製品の取扱説明書を必ずご参照ください。

## 装置の保護の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器  
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：装着部の無い機器のため規定しない  
水の浸入又は微粒子状物質の侵入に対する保護の程度  
の分類：IPX1

## 動作保証条件

周囲温度：0～40℃  
相対湿度：15～95%RH（ただし結露なきこと）

## 付属品

非医療機器  
・ DP 映像ケーブル  
・ USB ケーブル  
・ 電源コード

## 【使用目的又は効果】

接続する製品の添付文書を参照してください。

## 【使用方法等】

### 使用方法

1. 本ディスプレイを適切な位置に設置します。
2. ディスプレイ N22 の場合は COL-N22-B モニタ本体と、ディスプレイ N19 の場合は COL-N19-B モニタ本体と各ケーブルで接続します。
3. モニタ本体の電源を入れます。
4. 本ディスプレイに AC アダプタを接続して電源を入れ、使用を開始します。  
（表示モードの設定変更を有効にするには、モニタ本体の再起動が必要です。）

## 【使用上の注意】

### 重要な基本的注意

指定された製品以外、接続しないでください。[正常に動作しない、性能を満たさないなどにより安全上の問題が生じる恐れがあります。]（指定の製品については、接続する製品の添付文書を確認、または最寄りの販売業者までお問い合わせください。）

## 【保管方法及び有効期間等】

### 保管方法

以下の場所には、設置、保管しないでください。[故障や動作不良の原因になります。]

- ・ ほこり、塩分、硫黄などを含んだ空気の場合
- ・ 直接日光が長時間当たる場所（液晶は紫外線で劣化します）
- ・ 水や蒸気がかかる場所
- ・ 振動や衝撃のかかる場所
- ・ 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所

### 保管条件

周囲温度：-20～60℃  
相対湿度：10～95%RH（ただし結露なきこと）

### 耐用期間

設置後 6 年 [自己認証（製造元）による]  
ただし、定期的な保守点検が行われ、指定した環境で適切に保管および使用された場合の標準的な年数であり、使用状況により異なります。

## 【保守・点検に係る事項】

### 使用者による保守点検事項（日常点検）

項目	内容
外観	・ 機能上問題のある傷、割れ、変形がないこと
付属品	・ 亀裂や破損、断線がないこと
機能・動作	・ 各種スイッチ、タッチパネルが正しく機能すること ・ バックライトが暗い、波形や文字が不鮮明などの現象が発生していないこと

### 業者による保守点検事項（定期点検）

定期点検は、故障や事故を未然に防ぎ、安全性・有効性を維持するために不可欠な作業です。少なくとも年に 1 度、保守点検マニュアルに従って行ってください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フクダ電子株式会社

\*電話番号：03-5802-6600（お客様窓口）

### 外国製造業者

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.  
（中国）

シンセン マインドレー バイオメディカル エレクトロニクス カンパニー リミテッド

### 販売業者の連絡先

フクダコーリン株式会社  
カスタマーサポートセンター  
電話番号：0120-088-203