

機械器具 21 内臓機能検査用器具


高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

特定保守管理医療機器 「生体情報モニタ Accumil N シリーズ」の構成品 レコーダモジュール

【形状・構造及び原理等】

本モジュールは、サテライトモジュールラック 2 に装着することで、モニタ本体 (COL-N22-B、COL-N19-B) の波形、測定値などの情報を記録することが可能となります。

構成 外観図

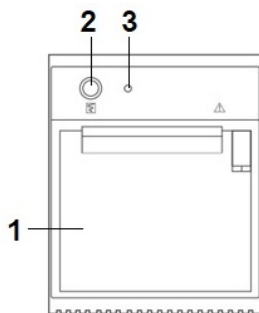

番号	名称	番号	名称
1	カバー	3	インジケータ
2	記録ボタン	—	—

寸法・質量

寸法 (mm): W80.5×H102×D136.5
(カバーなどの突起部除く)

質量 (kg): 0.38 (プリンタペーパー除く)

動作保証条件

周囲温度: 0~40°C

相対湿度: 15~95%RH (ただし結露なきこと)

付属品

プリンタペーパー

【使用目的又は効果】

使用目的

接続する機器の添付文書を参照してください。

【使用方法等】

使用方法

- 1.本装置をサテライトモジュールラック 2 に装着します。
- 2.カバーを開け、プリンタペーパーを装着します。
- 3.モニタ本体で記録する項目を設定します。
- 4.記録ボタンを押し、記録を行います。
(記録を停止するには、再度記録ボタンを押します。)

【使用上の注意】

重要な基本的注意

指定の機器以外、接続しないでください。[正常に動作しない、本来の性能を満たさないなどにより、安全上の問題が生じる恐れがあります。] (指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認、または最寄りの販売業者までお問い合わせください。)

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

以下の場所には、設置、保管しないでください。[故障や動作不良の原因になります。]

- ・ほこり、塩分、硫黄などを含んだ空気のある場所
- ・直接日光が長時間当たる場所
- ・水や蒸気がかかる場所
- ・振動や衝撃のかかる場所
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所

保管条件

周囲温度: -20~60°C

相対湿度: 10~95%RH (ただし結露なきこと)

耐用期間

設置後 6 年 [自己認証 (製造元) による]

ただし、定期的な保守点検が行われ、指定した環境で適切に保管および使用された場合の標準的な年数であり、使用状況により異なります。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項 (日常点検)

項目	内容
外観	・機能上問題のある傷、割れ、変形がないこと
機能・動作	・記録ボタン、インジケータが正しく機能すること ・プリンタペーパーの送りが正常で、記録内容が確認できること

業者による保守点検事項 (定期点検)

定期点検は、故障や事故を未然に防ぎ、安全性・有効性を維持するために不可欠な作業です。少なくとも年に 1 度、保守点検マニュアルに従って行ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: フクダ電子株式会社

電話番号: 03-3815-2121 (代)

外国製造業者

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル エレクトロニクス カンパニー リミテッド

販売業者の連絡先

フクダコーリン株式会社

カスタマーサポートセンター

電話番号: 0120-088-203

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。