

歯科材料08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう(超硬質石こう) JMDNコード: 70897020

スーパーブラウン

【禁忌・禁止】

本材は、絶対に口腔内に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士石膏株式会社
電話番号 0561-82-3305

【形状・構造及び原理等】

形状/粉材: 粉末状

色調/ブラウン

成分/本材は、下記成分より構成される。

性状	成分
粉末	石こう、着色材、その他

物理的性質

標準混水量(粉100gに対して)	2.3～2.5mL
硬化時間	10分
硬化膨張	0.1%
圧縮強さ	4.5MPa

販売元 株式会社キャスティング・オカモト
電話番号 0740-22-5011

【使用目的又は効果】

歯科医院及び歯科技工所における、歯科臨床模型・作業模型作成に用いる、形状・反転が可能な歯科用超硬質石こうです。

【使用方法等】

- ① 標準混水量は、本品粉末100gに対し、水2.3～2.5mLです。
●練和及び流し込みに支障のない限り、混水量は少ない方が強度の高い表面滑沢な模型が得られます。
- ② 練和は、手練り後に、真空攪拌機で30～60秒行くと、気泡も少なく均一に練ることができます。
- ③ 印象等に注入する際、バイブレーターを使用すると、より気泡の少ない精密で強度もある模型が得られます。
- ④ 注入後40～60分で模型を取り出せます。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本材を扱う際(硬化体を研削する場合も含む。)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
 - ・本材は、歯科用超硬質石こうの用途以外には使用しないこと。
 - ・本材は、**歯科医療有資格者**以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、包装に記載の使用期限までに使用すること。

(例 EXP09-12は
使用期限2009年12月を示す。)