

## \*\* 玉付 ミラーホルダー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 形状

- ・ 口腔内診査等に用いる器具で、棒状のもの。
- ・ 先端部はミラーヘッドが装着できるネジ加工が施されている。
- ・ 玉付部・柄・先端部により構成されネジ加工が施されているため分解することが可能。



#### \* 2) ネジ仕様

- ・ ミリねじ

#### \* 3) 材質・組成

- ・ 玉付部・柄・先端部 … 真鍮鋼・クロムメッキ

### 【使用目的又は効果】

- ・ 口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で通常はミラーヘッド及びホルダーからなるものをいう。

### 【使用上の注意】

#### \* <重要な基本的注意>

- \* 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、速やかに滅菌前の洗浄・滅菌を行い、使用すること。
- \* 2) 本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- \* 3) 子供等の診療・治療時には開口器具を用いて開口状態を維持すること。本製品を噛み、口腔内で破損し、怪我をする恐れがある。
- 4) 破折等による誤飲の恐れがあるので、以下は行わないこと。
  - ① 本製品に対する曲げ・切削・加圧等
  - ② 粗雑な扱い(キズを付ける・落下させる・強い衝撃を与える等)
- 5) 誤飲の予防
  - ・ 器具および破折片等の誤飲を防止する為の処置(例えばラバー防湿等)をとった上で器具を使用すること。
- \* 6) 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに清拭すること。
  - ・ 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。  
(次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、過酢酸)

### 【保管方法及び有効期間等】

#### \* <保管の条件>

- 1) 「もらい錆び」が発生する恐れがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- 2) 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてからホルダーを組立て保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### \* <使用者による保守点検事項(日常点検)>

- \* 1) 以下の方法及び条件で、患者ごとに滅菌前の洗浄・滅菌を行うこと。
  - ① 洗浄方法
    - ・ 家庭用洗剤・超酸化水(超酸性水)は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
    - ・ 使用後は、直ちにホルダーを分解し防錆洗浄剤、精製水を用いて超音波洗浄を施し、器具に付着した汚れを除去すること。

- ・ 錆びや腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

#### ② 滅菌方法

- ・ 滅菌には出来る限り精製水を使用のこと。(水道水使用の場合塩素イオンの影響で変色、腐食することがある)
- ・ 加熱加圧滅菌器の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具の変色、変質を起こすことがある。
- ・ 消毒、滅菌する際は、歯鏡をホルダーから外しホルダーを分解して行うこと。
- ・ 滅菌は使用一回ごとに加熱加圧滅菌器にて行うこと。
  - 滅菌温度/時間 : 132℃/5分以上
  - 滅菌温度/時間 : 121℃/20分以上

#### 2) 使用前に以下について点検すること。

- ① 汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食がないか点検すること。
- ② 玉付部・柄・先端部のネジ部に緩みがないか点検すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : 株式会社 藤原歯科産業