

機械器具 34 医療用刀  
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000

## フェザートリミングナイフハンドル(F-80HL)

### 【警告】


- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。  
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

### 【禁忌・禁止】

- オートクレーブ滅菌禁止。[ハンドルが破損するおそれがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

形状:

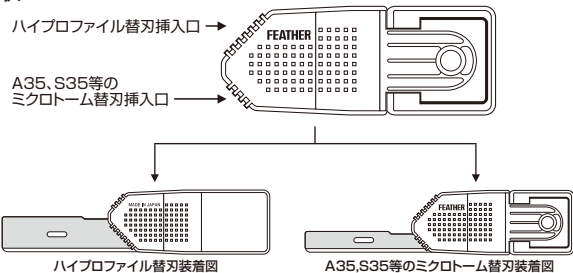

組成: ポリアセタール

原理: バネ固定式

### 【使用目的又は効果】


組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるように設計された器具。

### 【使用方法等】


ハンドルに専用替刃を装着して使用してください。

#### ＜替刃の装着方法＞

ボタンを押し、挿入口を開いてください。

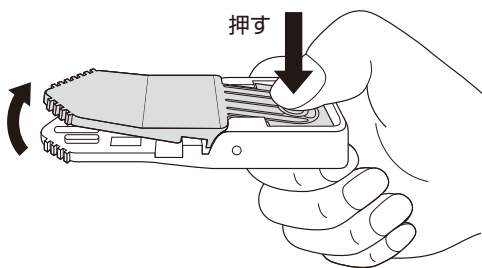


替刃の抜き穴を挿入口の凸部に入れ装着してください。

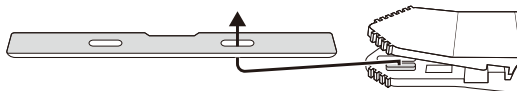

＜専用替刃＞ フェザーマイクローム替刃  
製造販売届出番号: 21B2X10001071002

#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 専用替刃以外の替刃を取り付けけないこと。  
[替刃が固定できないおそれがある。]
- 汚れなどを落とす際にキシレン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないこと。[ハンドルが破損するおそれがある。]
- 使用する際には、ハンドル前方を持って使用すること。

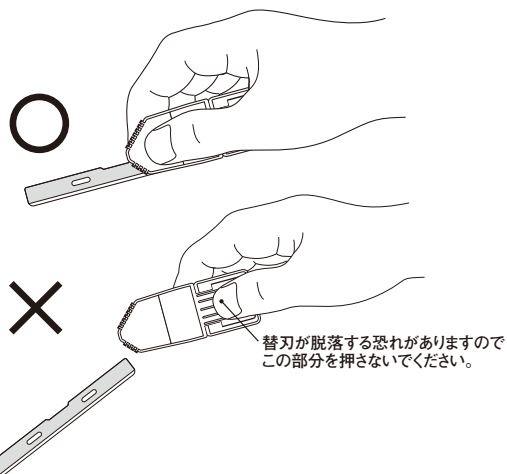

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

- 替刃がハンドルに固定できたことを確認し使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

#### 【保守・点検に係る事項】

##### ■使用後の洗浄方法

- 使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場  
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社  
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店  
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917