

機械器具 40 医療用のこぎり
一般医療機器 のこぎり 34821001


フェザートリミングナイフ替刃

【警告】

- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

形状と品番

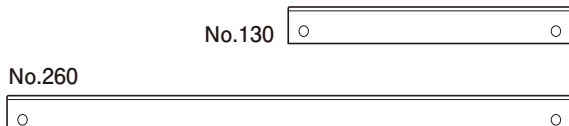

組成:カーボン鋼


原理:本品は、非常に鋭利な切刃により、病理標本作製の為に体内から取り出された組織、物体の一部を切断又は分離する。

【使用目的又は効果】

手動式の器具で、解剖学的構造又は物体の一部を切断又は分離する目的で用いる器具。

【使用方法等】

包装を開封して替刃を取り出し、専用ハンドルに取り付けて使用してください。

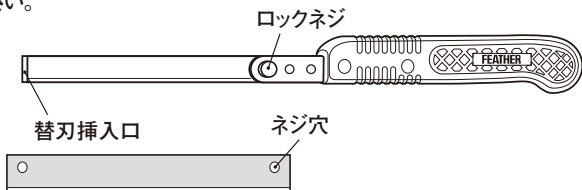

1. ロックネジをゆるめ、替刃を替刃挿入口から刃先を損傷しないようガイド背金にそって、替刃がとまる場所まで入れる。
 2. ロックネジと替刃のネジ穴を合わせ、ロックネジをしめる。
- ※替刃を取り替える場合はロックネジをゆるめ、替刃をゆっくりと抜き取る。

＜専用ハンドル＞ フェザートリミングナイフハンドル
製造販売届出番号:21B2X10001052001

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 専用ハンドル以外のハンドルへ取り付けけないこと。[替刃が固定できないおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数:使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917