

機械器具 27 医療用マイクローム  
一般医療機器 単回使用マイクローム用刃 42440000

## フェザーマイクローム替刃

再使用禁止

### 【警告】


- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。  
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。[切片に歪み、シワ等が発生するおそれがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

主な形状

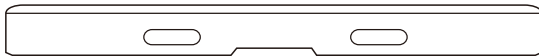

組成: ステンレス鋼/カーボン鋼/高速度工具鋼/超硬合金

原理: 本品は、鋭利な切刃により、パラフィン等で固定された組織を超薄片に削る。

### 【使用目的又は効果】

非常に鋭利な切刃をもつ平たい楔形の刃として設計された器具をいう。通常、パラフィンで固定した組織を超薄片に削るために使用するマイクロームに取り付けられている。本品は単回使用である。

### 【使用方法等】

デispenser又はケースより、替刃を取り出し専用ホルダーに装着し使用してください。

＜専用ホルダー＞ フェザーマイクロームホルダー

製造販売届出番号: 21B2X10001072002

### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 専用ホルダー以外のホルダーへ取り付けないこと。[替刃が固定できないおそれがある。]

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

- 替刃が専用ホルダーに固定できたことを確認し使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場  
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社  
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店  
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917