

2017年4月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)
2015年3月(第1版)

製造販売届出番号 21B2X10001091008

機械器具 40 医療用のこぎり
一般医療機器 のこぎり 34821001

フェザーセーフトリミングナイフ替刃

【警告】

- 非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[切傷、穿刺等のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

形状と品番

No.M130C



No.M260C



組成: 刃部/カーボン鋼
背金/ステンレス鋼

原理: 非常に鋭利な切刃により、病理標本作製のために体内から取り出された組織、物体の一部を切断又は分離する。

【使用目的又は効果】


手動式の器具で、解剖学的構造又は物体の一部を切断又は分離する目的で用いる器具。

【使用方法等】


替刃を専用ハンドルに取り付けて使用してください。

＜替刃の取り付け方法＞


1. ハンドル上部と側面の替刃固定ネジが緩んでいることを確認し、カバー付きの状態ですて替刃を挿入口から替刃が止まるまで差し込む。

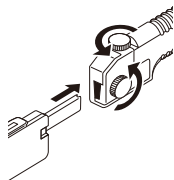

2. 最初に側面の替刃固定ネジを締めてから上部のネジを締め替刃を確実に固定する。

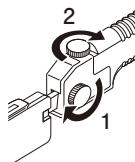

3. 替刃カバーのロックを外し、替刃を取り出す。

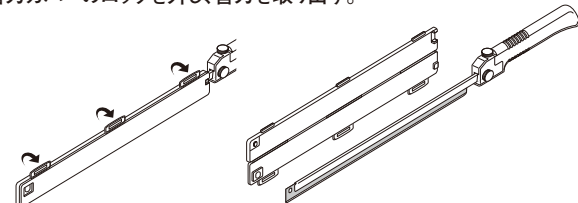

※替刃を外す際は、逆の手順で行なってください。
※切れ味が悪くなった替刃は、早めに取り替えてください。


＜専用ハンドル＞ フェザートリミングナイフハンドル
製造販売届出番号: 21B2X10001052001

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞


- 専用ハンドル以外のハンドルへ取り付けけないこと。
[替刃が固定できないため。]

＜替刃カバーの取り付け方法＞

1. 替刃先端の穴を替刃カバーの突起部分に合わせ、替刃後部をカバーの溝に合わせる。

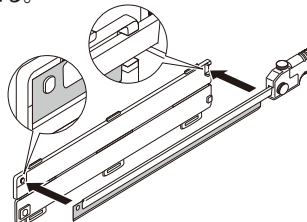

2. 替刃が替刃カバーの突起部分と溝から外れないように注意し、替刃カバーを閉じ先端から順にロックをする。

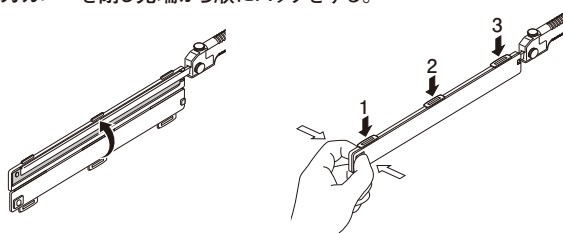

使用後は、替刃カバーを付けて廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

＜製造元＞フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

＜お問い合わせ先＞フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917