

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000


フェザーセーフティリミングナイフハンドル (F-1326P)

【警告】

- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
[刃物による切傷、穿刺等のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

形状と品番
F-1326P

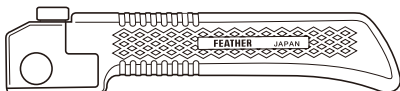

組成: 柄部/ポリスルホン
その他/ステンレス鋼

原理: ネジ固定式

【使用目的又は効果】



組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるように設計された器具。

【使用方法等】

包装を開封してハンドルを取り出し、専用替刃を装着して使用してください。

<替刃の取り付け方法>

1. ハンドル上部と側面の替刃固定ネジが緩んでいることを確認し、カバー付きの状態で替刃を挿入口から替刃が止まるまで差し込む。
2. 最初に側面の替刃固定ネジを締めてから上部のネジを締め替刃を確実に固定する。
3. 替刃カバーのロックを外し、替刃を取り出す。

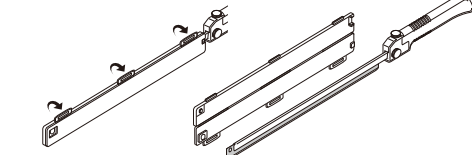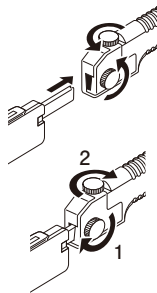

※替刃を外す際は、逆の手順で行なってください。


<専用替刃> フェザーセーフティリミング替刃
製造販売届出番号: 21B2X10001091008

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 専用替刃以外の替刃を取り付けないこと。
[替刃が固定できないため。]
- 汚れなどを落とす際にキシレン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないこと。[ハンドルが破損するおそれがあるため。]

<替刃カバーの取り付け方法>

1. 替刃先端の穴を替刃カバーの突起部分に合わせ、替刃後部をカバーの溝に合わせる。
2. 替刃が替刃カバーの突起部分と溝から外れないように注意し、替刃カバーを閉じ先端から順にロックをする。

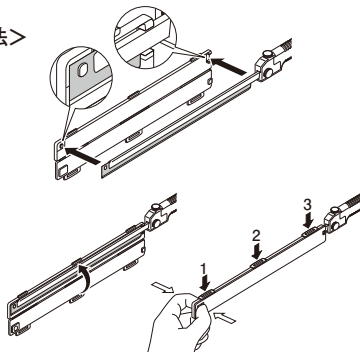

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 替刃がハンドルに固定できたことを確認し使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守・点検に係る事項】

■使用後の洗浄方法

- 使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

■再使用の為の滅菌方法

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオーブントレイ又は、滅菌籠等に乗せてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順又は病院における滅菌の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は、適切な方法で次回使用まで保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元> フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元> フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先> フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917