

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 へら 13645000

フェザースキンスクレイパー

【警告】

- 先端部は尖形であるため、取り扱いに注意すること。
[穿刺等のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

No.SS-1



組成:ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、表面への物質の塗布、腔への物質の充填、組織の処置、表面又は血管からの物質の除去に用いる器具である。

【使用方法等】

ハンドルを持ち、先端部で皮膚組織の処置、表面からの物質を除去する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 先端部で皮膚組織に損傷を与えないように注意すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品の使用により発疹、皮膚炎などのアレルギー症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数：使用后1年(未使用品保証期間5年)(自己認証による)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守・点検に係る事項】

■使用後の洗浄方法

- 使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用方法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

■再使用のための滅菌方法

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオープントレー又は、滅菌籠等に乗せてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順又は病院における滅菌の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は、適切な方法で次回使用まで保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917