

器 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

エアウェイ (バーマン)

TP-102

【警告】


- ・ 本器は未滅菌品です。
- [適用対象 (患者)]
- ・ 患者に適したサイズを選択してください。
- [使用方法]
- ・ 患者の舌根部が押し込まれていない事、適切に気道が確保されている事を確認してください。

【禁忌・禁止】

- ・ オートクレープ、煮沸、薬剤 (アルコール、次亜塩素酸ナトリウム等) による消毒は行わないでください。(変形する場合があります。)

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

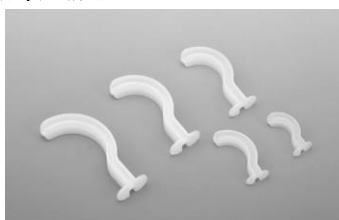

組成: ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したチューブであり、舌による気流遮断の防止に有用である。

【使用方法等】

- 1) 使用する患者に適合するエアウェイのサイズを選定してください。
- 2) 患者の口を大きく開き、舌に注意しながら処置法等に従って挿入してください。

【使用上の注意】

初めて使用する時や長期保管後は洗浄・滅菌 (EOG 滅菌) を行ってください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- ・ 洗浄、滅菌 (EOG 滅菌) を行い、水滴等がないことを確認し保管してください。

耐用期間

3 年 (自己認証による)

* 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・ 使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・ 使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・ 一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・滅菌

- ・ 洗浄してください。
- ・ 滅菌 (EOG 滅菌) を行う場合は、使用する機器の機能等をご理解の上ご使用ください。
- ・ 変形等がないことを確認してください。

* * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL : 049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)