

器 5 0 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000

開孔器（エスマルヒ）

TP-103

* 【警告】


- ・ 本器は未滅菌品です。

[使用方法]

- ・ 患者の舌根部が押し込まれていない事、適切に気道が確保されている事を確認してください。

* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

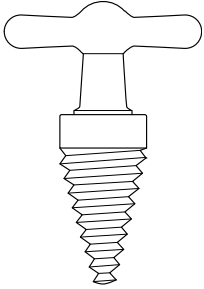

組成：ポリカーボネイト

* 【使用目的又は効果】

患者の口に挿入し、開孔のために用いる。

* 【使用方法等】

- 1) 処置法等に従い、患者の口に開孔器の先端を挿入してください。
- 2) 開孔器を回転させて患者の口を開孔してください。

【使用上の注意】

初めて使用する時や長期保管後は洗浄・消毒を行ってください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6 年（自己認証による）

* 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・ 使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・ 使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・ 一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させてください。

[推奨薬剤]

- ・ 消毒用アルコール
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

* * * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

TEL：049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）