

器 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 耳鼻咽喉科用カテーテル 16432001

バイトブロック

TP-105

【警告】

- ・本品は未滅菌品です。
- 〔適用対象（患者）〕
- ・患者に適したサイズを選択してください。

【推奨薬剤】

- ・消毒用アルコール
 - ・次亜塩素酸ナトリウム
- ※使用後は薬剤を洗い流してください。

* 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

ブルークロス株式会社
TEL : 049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）

【形状・構造及び原理等】

形状・構造



組成

本体 : シリコンゴム
インサート : ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

管状手術器具で、吸引又は灌流あるいは他の手術器具を挿入するための通路を残すものをいう。

【使用方法等】

- 1) 使用する患者に適合するバイトブロックのサイズを選定してください。
- 2) 処置法等に従い、患者へ経口挿管したチューブを本品のつば部の半円カット部に沿わせ、サージカルテープ等でチューブに固定してください。
- 3) チューブを固定した本品を患者の上歯と下歯との間に挟んでください。
- 4) 使用中は、正しい位置に装着していることを確認してください。

* 【使用上の注意】

- ・使用前に洗浄による浄化又は消毒や滅菌を行ってください。
- ・長期使用の場合、1日1回は本品の固定を外し、オーラルケアを行い、設置する位置を移動して固定を直してください。※チューブやバイトブロックが口角、口唇、口蓋、舌の同じところを長く圧迫し続けると、口角の発赤や口唇の損傷、粘膜のびらんや壊死を起こすことがあります。
- ・創傷又は本品損傷の原因になるため、本品の無理な挿入や抜取は行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6 年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させてください。

【オートクレープ】

121℃、20分まで

※オートクレープの際は機器の取扱説明書等をお読みください。