

器 7 6 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式加湿器 35113000

湿潤器 (加湿瓶)

TP-113

* * 【警告】


- ・ 本器は未滅菌品です。
- [使用方法]
- ・ 使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。
- [併用医療機器]
- ・ 酸素吸入器に確実に接続されている事を確認してください。
 - ・ 酸素マスクや酸素カニューラが、確実に接続されている事を確認してください。
 - ・ 酸素マスクや酸素カニューラからの酸素流出を確認し、患者に装着してください。

【禁忌・禁止】

- ・ 異なる機種の商品を接続しないでください。
- ・ 有害な空気の中で使用しないでください。
- ・ 酸素中に油が混入する様な環境下で使用しないでください。
- ・ 煙草や裸火のそばで使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

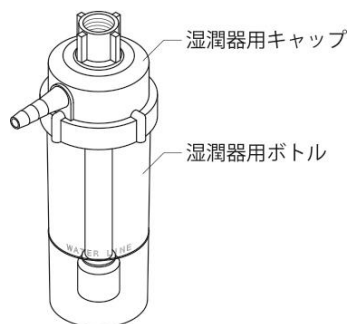

【使用目的又は効果】

酸素吸入時の乾燥したガスに水蒸気を添加するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 湿潤器用キャップを外してください。
- 2) 湿潤器用ボトルのウォーターライン (WATER LINE) ま
で、精製水を入れてください。
- 3) 湿潤器用ボトルに、湿潤器用キャップを接続してください。
- 4) 酸素吸入器〔併用医療機器〕に、湿潤器 (加湿瓶) を接続してく
ださい。
- 5) 湿潤器 (加湿瓶) に、酸素マスク・酸素カニューラ〔併用医療機
器〕を接続してください。

* * 【使用上の注意】

- ・ 湿潤器用ボトル中の精製水がウォーターラインを越えていないことを
確認してください。
- ・ 点検等で酸素流出口を塞ぎ酸素供給すると、各接続部から酸素が漏れ
ますが故障ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管し
ないでください。

耐用期間

6 年 (自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・ 使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・ 使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・ 一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られる
ようにしてください。

[推奨薬剤]

- ・ 消毒用アルコール
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

※両性界面活性型外用殺菌消毒剤等の薬液は使用しないでください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

T E L : 0 4 9 - 2 4 3 - 9 9 3 9

www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)