

器O6呼吸補助器  
管理医療機器 酸素投与キット12855000

「エマジンオキシゲンシステム」の付属品  
エアゾールマスク No.8-1 成人用 /  
エアゾールマスク No.8-2 子供・小児用

再使用禁止

TP-218

**\*【警告】**

- ・火気に近づけないでください。
- ・本器（ヘッドバンド）には天然ゴムを使用しています。  
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- ・天然ゴムと接触する機会が多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

**【使用方法】**


- ・本器は感染予防のため一患者専用として使用してください。
- ・エアゾールマスク本体からの流出を確認し、患者に装着してください。
- ・ヘッドバンドの締め付け（圧迫）による皮膚損傷の発生に注意してください。

**\*【禁忌・禁止】**


- ・再使用はしないでください。
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用、及び患者へ使用しないでください。

**【形状・構造及び原理等】**

形状・構造

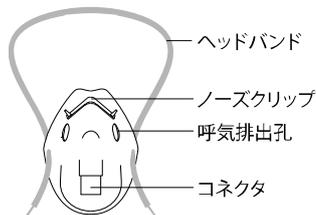

(エアゾールマスク No.8-1 成人用)

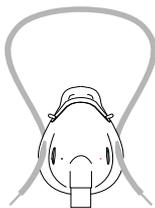

(エアゾールマスク No.8-2 子供・小児用)

**組成**

ポリ塩化ビニール

※可塑剤としてフタル酸ジ2-エチルヘキシル/フタル酸ジイソニールを使用しております。

**\*【使用目的又は効果】**

本器は、患者の鼻と口を覆いエアゾールを吸入させる為の吸入療法に使用される。

**\*【使用方法等】**

- ・エアゾールマスクを顔面にあて、ヘッドバンドを後頭部に掛けてください。
- ・ヘッドバンドの両端を引っ張り、エアゾールマスクを固定してください。
- ・ノーズクリップを調節し、漏れを防いでください。

**【使用上の注意】**

構成品等を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。

**\*【保管方法及び有効期間等】**

**保管方法**

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

**有効期間**

2年（自己認証による）

**\*\*、\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

ブルークロス株式会社

TEL：049-243-9939

www.bluecross-e.co.jp

販売業者（販売店）