

器 3 2 医療用吸引器 (手動式のものに限る)
管理医療機器 手動式可搬型吸引器 36616010

ブルークロスフットサクションプンプ

TP-201

【警告】

- ・本品 (吸引ポンプ) には天然ゴムを使用しています。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
 - ・天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
- 〔使用方法〕
- ・使用前に機能テストを行い、正常な作動を確認してください。


【禁忌・禁止】

- ・異なる機種 of 構成部品を接続しないでください。
- ・採血用には使用しないでください。
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用、及び患者へ使用しないでください。

** 【形状・構造及び原理等】

形状・構造

- ①吸引ポンプ
- ②吸引瓶
- ③吸引弁
- ④排気弁
- ⑤吸引チューブ
- ⑥吸引カテーテル (別途購入品)

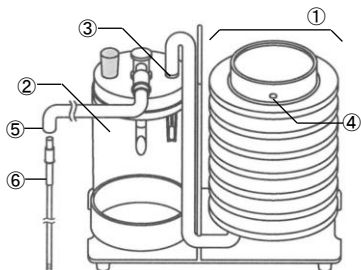

原理

吸引ポンプを圧縮すると、吸引ポンプ内部の空気が外部に放出される。吸引ポンプを開放すると、吸引ポンプ内部の圧力は低くなり、接続された吸引瓶内部に陰圧が生じる。発生した陰圧を利用して異物の吸引を行う。

仕様

- 〔FP-300〕
最大吸引圧 : -4.0 kPa (-30.0 mmHg)
- 〔FP-190〕
最大吸引圧 : -2.5 kPa (-19.0 mmHg)

【使用目的又は効果】

本器は電力や酸素源を必要とせず人工呼吸時における気道内の異物等の吸引に使用でき、病院用又は屋外用として、小型軽量で携帯に便利です。

* 【使用方法等】

- 1) 吸引口にチューブやカテーテル (併用医療機器) 等を接続してください。
 - 2) 吸引ポンプの圧縮、開放を繰り返し、吸引を行ってください。
 - 3) 精製水等の清潔な水を吸引し、チューブやカテーテル (併用医療機器) 等の内部を洗浄してください。
 - 4) 吸引瓶を取り外し、吸引物を捨ててください。
 - 5) 吸引瓶、チューブ、カテーテル (併用医療機器) 等を洗浄し、次の使用に備えてください。
- ※再使用禁止の併用医療機器は洗浄せず廃棄してください。

【使用上の注意】

構成部品、オプション品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6 年 (自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・使用前に破損や汚れがないことを確認する。
- ・使用前に作動することを確認する。

業者による保守点検事項

- ・一年毎に破損や汚れがないことを確認する。
- ・一年毎に作動することを確認する。

洗浄・消毒

※吸引瓶一式、吸引チューブ、連結ホースに限る。

- 1) 分解して洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させ、正しく組み立て正常な働きが得られるようにしてください。

〔推奨薬剤〕

- ・消毒用アルコール
- ・次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

※両性界面活性型外用殺菌消毒剤等の薬液は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社
TEL : 049-243-9939
www.bluecross-e.co.jp

販売業者 (販売店)