

機械器具(12) 理学診療用器具
一般医療機器
体表用除細動電極（15033001）

マルチファンクションパッド（小児用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


1. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、患者に装着するための 1 対のパッド、導電のためのケーブル、および除細動器に接続するためのコネクタから構成される。

2. 各部の名称

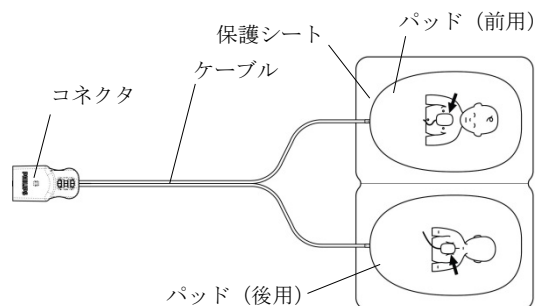

3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
M3719A	5 組

(2) 原材料

装着部ジェル：導電性ハイドロゲル

4. 原理

ケーブル内の導線、パッドの装着部ジェル等の導電体により、除細動器からの電気ショックを患者に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の心臓が細動状態の場合に、正常な心拍の回復のため、開胸しない胸の上に装着し、除細動器から患者に制御された電気ショックを伝達するために用いる。

【使用方法等】

1. 患者の胸部から衣類を残さず取り除き、胸部が清潔で乾燥していることを確認する。パッド装着部に経皮的貼付薬剤が貼付してある場合は、すべて剥がしておくこと。
2. パッケージを開封し、パッドを取り出す。
3. 保護シートからパッドを剥がす。
4. 前用パッドを患者の胸部中央位置に、後用パッドを肩甲骨中央位置に、パッドの接着面をあてて確実に装着する（図 1 参照）。または後用パッドを患者の右鎖骨直下の位置に、前用パッドを左胸部直下から腋窩側にかけて肋骨の位置に、パッドの接着面をあてて確実に装着する（図 2 参照）。

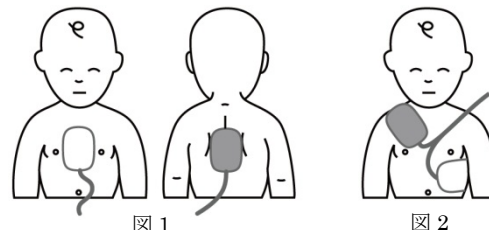


図 1

図 2

5. 除細動器にパッドのコネクタを接続する。
6. 除細動器の取り扱い方法に従って、除細動を行う。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. パッドは体重 10kg 未満の傷病者に使用すること。
2. パッケージに記載されている使用期限を確認し、使用期限切れの場合は使用しないこと。
3. パッケージは、パッドを使用する直前まで開封しないこと。ゲルが乾燥しているパッドは使用しないこと。
4. パッドの接触が悪い場合は、新しいパッドと交換すること。
5. ペーシングが長時間（30 分以上）に及ぶ場合は、患者の皮膚を定期的にチェックして、かゆみがないことを確かめること。
6. パッドを装着後 24 時間経過するか、除細動ショックが 50 回、またはペーシングが 1.5 時間に及んだ時点でパッドを交換すること。（100mA、80bpm）
7. パッドは未滅菌である。また、パッドは滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

温度：15～35℃

湿度：湿気の無い場所に保管すること。

2. 使用期間

使用期限：製造から 24 ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・ AED コールセンター

電話番号：0120-802-337

平日 9 時～18 時