

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
単回使用心電用電極（35035000）

PHILIPS ディスポーザブル電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. MRI 検査室では使用しないこと。[MR 装置への吸着や、やけど等のおそれ]（製品番号 M2202A を除く）
2. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、電極、パッド及びゲルから構成されており、さらにベースシートが構成に加わった形体もある。

2. 外観

本品は形状により下記の種類がある。

A. 四角型



B. 楕円型



C. ティアドロップ型



D. 丸型



E. 長方形



F. タブ型



G. オーバル型



3. 仕様

(1) 製品タイプ

X 線透過型電極			
製品番号	形状	電極サイズ (mm)	備考
13951C	四角型	22×33	300 枚
13955C		22×22	
989803148801		32×41	1500 枚
M4612A	ティアドロップ型	33 (直径)	300 枚
M4613A		33 (直径)	
40489E	丸型	59 (直径)	
40493E		54 (直径)	1000 枚
13943B	タブ型	35×20	
40420A	長方形	28×65	
40420A-300	オーバル型	32×55	300 枚

X 線透過型電極

製品番号	形状	電極サイズ (mm)	備考
989803148821	楕円型	43×36	600 枚
M2202A	丸型	50 (直径)	300 枚
	ティアドロップ型		

(2) 原材料

装着部：導電性ゲル

4. 原理

心電計リード及び心電計ケーブル内の導線を通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の体表に設置し、体表の電気信号を処理装置に伝達する導体である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用する心電計の取扱方法に従い、心電用電極に心電計リードを接続する。
2. 剥離紙を剥がし、心電用電極を患者に装着する。
3. 測定を開始する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 紅斑、病変または傷等のある皮膚部位には電極を装着しないこと。
2. 電極に対して皮膚過敏または炎症の病歴のある患者には使用しないこと。

詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

2. 有効期間

使用期限：包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

取扱説明書を、必ず確認してください。