

機械器具（21）内臓機能検査用器具  
一般医療機器  
単回使用心電用電極（35035000）

## PHILIPS 成人用リード付電極

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### 使用方法


1. MRI 検査室では使用しないこと。[MR 装置への吸着や、やけどのおそれ]
2. 除細動器の経皮ペースティングまたはカルディオバージョンのモニタリングには使用しないこと。[電磁干渉に対してシールド性能を持たないため]
3. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 構成

本品は、パッド、リードカバー、リード、コネクタ、装着ゲル及び電極から構成される。

##### 2. 外観

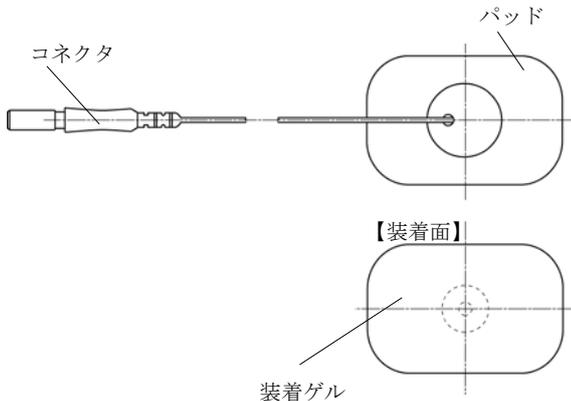

##### 3. 仕様

###### (1) 製品タイプ

製品番号	仕様	備考
989803156231	X線透過型3リード	300枚
989803156271	X線透過型5リード	300枚

###### (2) 寸法

全長：1054mm

###### (3) 原材料

装着部：導電性ゲル

##### 4. 原理

電極からリードを通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、体表に設置し、体表の電気信号を処理装置に伝達する導体である。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

1. ライナーを剥がし、本品を患者に貼付する。
2. 本品を生体電気現象検査用機器に接続する。
3. 接続先である生体電気現象検査用機器の取扱方法に従い、測定を開始する。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

1. 紅斑、病変または傷等のある皮膚部位には電極を装着しないこと。
2. 電極に対して皮膚過敏または炎症の病歴のある患者には使用しないこと。

詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

##### 2. 有効期間

使用期限：包装に記載

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日9時～18時