

機械器具(12) 理学診療用器具
一般医療機器
体表用除細動電極 (15033001)

マルチファンクションパッド M3713A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


- 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、患者に装着するための1対のパッド、導電のためのケーブル、および除細動器に接続するためのコネクタから構成される。

2. 各部の名称

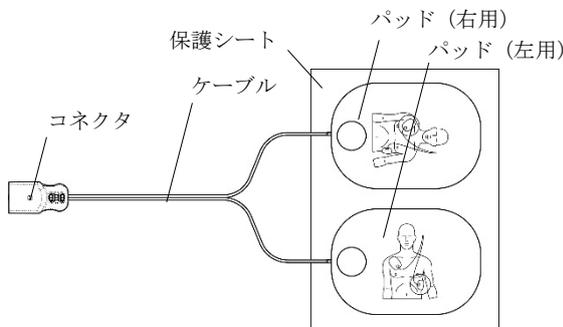

3. 仕様

** (1) 製品タイプ

製品番号	備考
M3713A	10組

(2) 原材料

装着部ジェル：導電性ハイドロゲル

4. 作動原理

ケーブル内の導線、パッドの装着部ジェル等の電導体により、除細動器からの電気ショックを患者に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の心臓が細動状態の場合に、正常な心拍の回復のため、開胸しない胸の上に装着し、除細動器から患者に制御された電気ショックを伝達するために用いる。

【使用方法】

- 患者の胸部を露出させ、清潔で乾燥していることを確認する。パッド装着部に経皮的貼付薬剤が貼付してある場合は、すべて剥がしておくこと。
- パッケージを開封し、パッドを取り出す。
- 保護シートからパッドを剥がす。
- 一方のパッドを患者の右胸上部の位置に、他の一方のパッドを左胸下部の位置（図1）に、パッドの接着面をあてて確実に装着する。

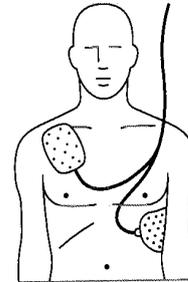


図1

- 除細動器にパッドのコネクタを接続する。
- 除細動器の取扱方法に従って、除細動を行う。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- パッケージに記載されている使用期限を確認し、使用期限切れの場合は使用しないこと。
- パッケージは、パッドを使用する直前まで開封しないこと。ゲルが乾燥しているパッドは使用しないこと。
- パッドの接触が悪い場合は、新しいパッドと交換すること。
- ペースリングが長時間（30分以上）に及ぶ場合は、患者の皮膚を定期的にチェックして、かゆみがないことを確かめること。
- パッドを装着後24時間経過するか、除細動ショックが50回、またはペースリングが8時間に及んだ時点でパッドを交換すること。（100mA、80bpmの場合）
- 除細動パッドは未滅菌であり、滅菌しないこと。

<妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>

（小児等への適用）

- 未就学児に対する小学生～大人用パッドの使用については、有効性・安全性が確認されていないことから、未就学児用に対応した機能（未就学児用パッド、未就学児用パッド・カートリッジ、未就学児用キー）を備えたAEDが近くにないなど、やむを得ない場合に限り使用すること。
- 小学生～大人用パッドを未就学児に使用する場合には、前胸部～後背部位置に装着することを推奨する。前胸部～後背部位置に装着することができない場合に、右胸上部～左胸下部位置へ装着する場合は、特に、2枚のパッドが触れあうことがないように、注意すること。[患者がやけどを負ったり、治療効果が得られないおそれ]

詳細は、本品および除細動器の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

温度：15～35℃

湿度：湿気のない場所に保管すること。

取扱説明書を、必ず確認してください。

2. 有効期間

使用期限：製造から 24 ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・ AED コールセンター

電話番号：0120-802-337

平日 9 時～18 時