

機械器具 (12) 理学診療用器具
一般医療機器
体表用除細動電極 (15033001)

** FR2 未就学児用除細動パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


- 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、患者に装着するための1対のパッド、導電のためのケーブル、除細動器に接続するためのコネクタ及び除細動器の接続エネルギーを減衰させる抵抗器から構成される。

2. 各部の名称

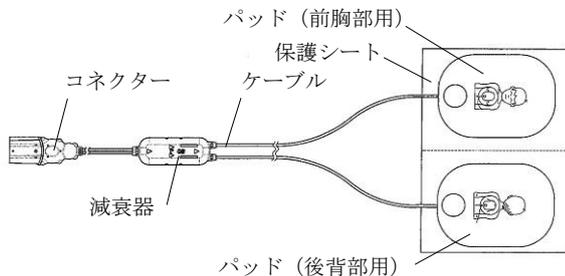

3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
M3870A	1組

(2) 原材料

装着部ジェル：導電性ハイドロゲル

4. 原理

ケーブルの導線、パッドの装着部ジェルなどの導電体により、除細動器からの電気ショックを患者に伝達する。また、付属する抵抗器により、除細動器の出力エネルギーを 150J から 50J まで減衰する。


【使用目的又は効果】

本品は、患者の心臓が細動状態の場合に、正常な心拍の回復のため、開胸しない胸の上に装着し、除細動器から患者に制御された電気ショックを伝達するために用いる。

【使用方法等】

- 患者の胸部から衣類を残さず取り除き、胸部が清潔で乾燥していることを確認する。パッド装着部に経皮的貼付薬剤が貼付してある場合は、すべて剥がしておくこと。
- 患者が未就学児であることを確認する。患者の年齢がそれを超える場合は、小学生～大人用除細動パッドを使用すること。
※ 除細動パッドの選択で患者への対応が遅れることのないよう注意すること。
- パッケージを開封し、パッドを取り出す。
- 保護シートからパッドを剥がす。

- 前胸用パッドを患者の胸部中央位置に、後背部用パッドを患者の肩甲骨中央位置にパッドの接着面をあてて確実に装着する。
(下図参照)

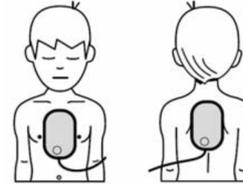

- 除細動器にパッドのコネクタを接続する。
- 除細動器の取扱方法に従って、除細動を行う。

組み合わせて使用する医療機器

本品は以下の医療機器と組み合わせて使用する。詳細は除細動器本体の取扱説明書を参照すること。

販売名	医療機器承認番号
ハートスタート FR2+	21400BZY00185000

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 破損又は使用期限を過ぎたパッドは、使用しないこと。
[動作不良のおそれ]
- パッドは、使用する直前まで開封しないこと。

使用上の注意の詳細については、除細動器の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

温度：0～43℃

湿度：湿気のない場所に保管すること。

2. 使用期間

使用期限：製造から 30 ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・AED コールセンター

電話番号：0120-802-337

平日 9時～18時

取扱説明書を、必ず確認してください。