


機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
心電計ケーブル及びリード（35562010）
Invivo 心電図ケーブル

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

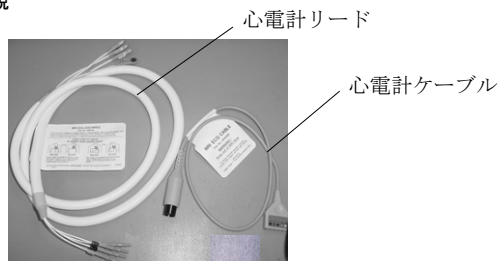

2. 仕様

- (1) 寸法：4,800 [mm]（最大 接続時寸法）
(2) 製品タイプ

製品番号	備考
0400-1006A	リード及びケーブル

3. 作動原理

心電計ケーブル及びリードを通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する際に用いられる。

【使用方法等】

1. 使用する心電計の取扱方法に従い、心電計ケーブルを心電計に接続する。
2. 心電計ケーブルを心電計リードに接続する。
3. 心電計リードを心電用電極に接続し患者へ装着する。
4. 測定を開始する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. MR システムのボア内の静磁場強度が 3.0 テスラ以下で、かつ MR システムによりレポートされる全身の平均比吸収率（SAR）が 4.0 W/kg までで使用する。
2. 本品をループ状にならないようにまっすぐに配置すること。
3. MRI スキャン時間が 15 分を超える場合は、MRI 関連の過熱に注意すること。
4. ケーブルが直接皮膚に触れないようにすること。
5. 指定されている心電用電極のみを使用すること。

【保守・点検に係る事項】

本品を正しく使用するために、下記項目について使用前点検を行うこと。破損の兆候が見られる場合は、直ちに使用を中止すること。

1. 外観の確認
傷、穴、変形など破損がないこと。
2. 清浄性の確認
血液等汚れが付着しておらず清浄な状態であること。

なお、詳細については接続する装置の取扱説明書を参照すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時