

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
単回使用心電用電極（35035000）

Invivo MRI 用ディスプレイ電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】


使用方法

1. 本品は一回限り使用のディスプレイ電極品であるので、再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観


ウェーブ型

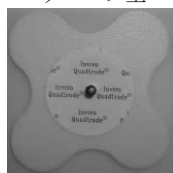

クオード型



トリプル型

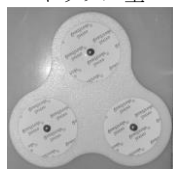

本品は、パッド、電極及びゲル付きスポンジから構成され、さらにベースシート並びに ECG リード固定テープが構成に加わった形状もある。電極のゲル及びパッドは剥離紙で保護されている。

2. 仕様

製品タイプ及び寸法

製品番号	型式番号	寸法 (mm)	形状 (型)	備考
989803179041	9371	63×63	ウェーブ型	25 枚
989803179051	9372	78×78	クオード型	25 枚
989803179031	9303	102×98	トリプル型	25 枚
989803158561	9369	98×98	トリプル型	50 枚

3. 作動原理

心電計リード／ケーブル内の導線を通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の体表に設置し、体表の電気信号を処理装置に伝達する導体である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 剥離紙を剥がし、患者に装着する。
2. 使用する処理装置の取扱方法に従い、心電計リード／ケーブルを接続する。
3. 処理装置にて、測定を開始する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. パッケージは、電極を使用する直前まで開封しないこと。ゲルが乾燥している電極は使用しないこと。
2. 皮膚に紅斑、病変、損傷がある部位には電極を装着しないこと。
3. 電極に対して皮膚過敏または炎症の病歴のある患者には使用しないこと。
4. 装着部位の皮膚が適切に処理され、清潔で乾いており、余分な体毛がないことを確認すること。
5. 電極素子を圧迫しないこと。
6. 新生児用の電極（型式番号：9372）を体重 10kg 以上の被験者に適用しないこと。

使用上の注意の詳細については、本品を接続する医療機器等の取扱説明書も参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

水濡れ、直射日光を避け、常温で保管すること。

2. 有効期間

** 製造から26ヵ月（新生児用電極（型式番号：9372）は20ヵ月）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時