

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
心電計ケーブル及びリード（35562010）
ディスプレイ ECG 電極リード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. MRI 検査室では使用しないこと。[MR 装置への吸着や、やけど等のおそれ]
2. 本品は、一回限り使用のディスプレイ品であるので、再使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと。
2. 本品は電源ケーブルや高周波の雑音を出すような電子機器の付近で使用しないこと。


詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、コネクタ及びリードから構成される。

2. 外観

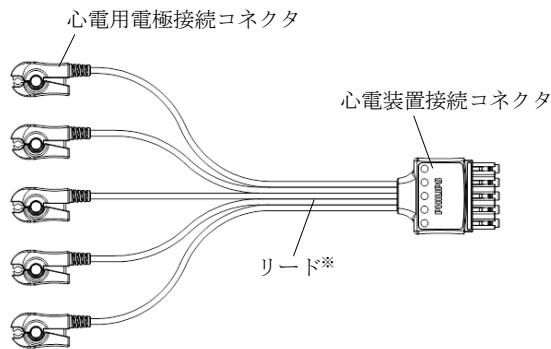

※：5 リード又は 3 リードがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	仕様	備考
989803174201	3 リード	20 個
989803174211	5 リード	

(2) 寸法

全長：1,000 mm

4. 原理

リードを通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は患者の心電図信号を心電装置に伝達する際に用いる。

【使用方法等】

1. 心電装置接続コネクタを心電装置に接続する。なお、必要に応じ、別に製造販売する心電計ケーブルを介し、心電装置に接続する。
2. コネクタを心電用電極に接続し、患者へ装着する。
3. 心電装置の取扱方法に従い、測定を開始する。

取扱説明書を、必ず確認してください。