


機械器具(49)医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器  
ガイド(37150000)  
ダイナトリム

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

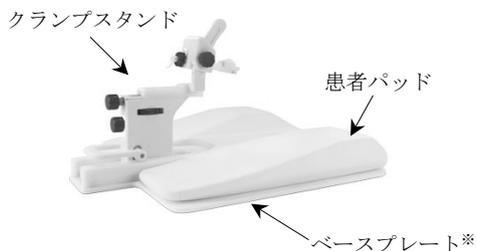

※平面タイプと湾曲タイプがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号:0120-556-494

平日9時~18時

【使用目的又は効果】

生検針を適正な進路に導くために用いる器具である。

【使用方法等】

1. クランプスタンドの調整ノブを操作し、ニードルガイド接続部を適切な位置に誘導する。
2. ニードルガイドを取り付ける。
3. 必要に応じて、さらにクランプスタンドを調整する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の医療機器と組み合わせて使用することができる。

販売名	医療機器届出番号
ニードルガイド	13B1X0022100066

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 調整ノブを許容範囲以上に回し過ぎると破損の原因になるので注意すること。
2. クランプスタンドを持って本品を持ち上げたり、動かしたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

\* 耐用期間

\* 10年 [自己認証(当社データ)による]

\* (但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用された場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある。)

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検(日常点検)＞

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

本製品の外観に異常がないことを確認すること。

- ・ 付属品などに損傷や摩耗がないこと

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

- ・ 本製品に被検者の体液、血液、汚物及び造影剤等が付着していないこと

詳細は取扱説明書を参照のこと。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。