

機械器具（49）医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器
ガイド（37150000）
ニードルガイド

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

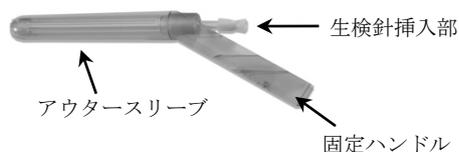

2. 仕様

- (1) 生体内に接触する原材料
ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

生検針を適正な進路に導くために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 滅菌包装から本品を取り出す。
2. 肛門に挿入する。（必要に応じて、一般市販品の医療用潤滑剤を用いる）
3. 固定ハンドルを指定の器具に取り付ける。
4. 生検針を挿入する。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の医療機器と組み合わせて使用することができる。
詳細は、組み合わせて使用する医療機器の取扱説明書を参照すること。

販売名	医療機器届出番号
ダイナトリム	13B1X00221000065

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品は、無菌的に取り扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管すること。

2. 有効期間

滅菌日より12ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9時～18時

取扱説明書を、必ず確認してください。