

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器
単回使用心電用電極（35035000）

ディスプレイパッド電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】


使用方法

1. 磁気共鳴画像診断装置(MRI)等の強い電磁波環境下にて使用しないこと。
2. 本品は一回限り使用のディスプレイパッド品であるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

本品は、基材となるパッド、導体となる電極、及びゲルから構成される。

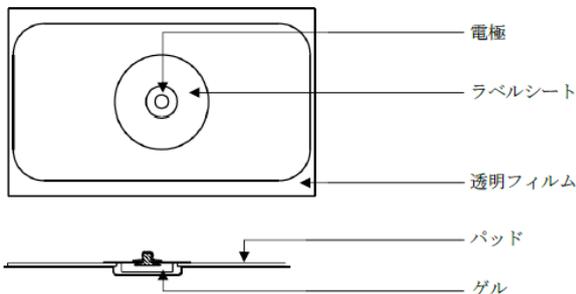

2. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
989803139771	25枚

(2) 寸法

外寸：95 mm×50 mm

(3) 作動原理

患者の体表に設置し、電極に心電アダプターケーブルを接続する事により、体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動等をグラフで表示する）に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の体表に設置し、体表の電気信号を処理装置（心臓の電気活動等をグラフで表示する）に伝達する導体である。本品は、単回使用である。

【使用方法等】

<取り付け>

1. 装着部位となる患者の太腿を剃毛し、清潔にする。
2. 清潔な乾いた布を使用して装着部位から水分、油分等を除去し乾燥させる。
3. 心電図ケーブル（本届出品目には含まない）に電極を取り付ける。
4. 本品に貼られている透明フィルムを外す。
5. 心電図ケーブルのついた本品を装着部位に貼る。

<取り外し>

1. 心電図ケーブルを電極から外す。
2. 本品を装着部位から丁寧に外す。

組み合わせて使用する医療機器

本装置は以下の医療機器と組み合わせて使用する。詳細は以下の医療機器の取扱説明書を参照すること。

販売名	医療機器認証番号
分娩監視装置 FM	218ACBZX00019000
分娩監視装置 FM40/50	222ACBZX00005000
分娩監視装置 Avalon	226ACBZX00062000

【使用上の注意】

<重要な基本的な注意>

1. 皮膚に紅斑、病変、損傷がある部位には電極を装着しないこと。
2. 装着部位の皮膚が適切に処理され、清潔で乾いており、余分な体毛がないことを確認すること。
3. 電極を装着する前の清拭に溶剤を使用しないこと。
4. 電極を装着したまま24時間を超えないこと。
5. 皮膚損傷のおそれがあるため、丁寧に取り外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

2. 有効期間

包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日9時～18時

取扱説明書を、必ず確認してください。