

機械器具（21）内臓機能検査用器具
 高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ（33586003）
「生体情報モニタ IntelliVue」の付属品
 サンプルングチューブ

再使用禁止**【禁忌・禁止】****1. 使用方法**

本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

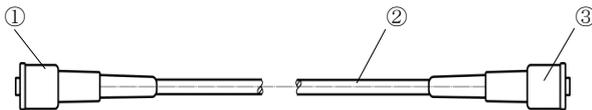
・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9時～18時

製造業者：フィリップス メディツィン システム ボブリンゲン社
 (Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH)

国 名：ドイツ連邦共和国

【形状・構造及び原理等】**1. 各部の名称**

① ルアーロックコネクタ 1

② チューブ

③ ルアーロックコネクタ 2

2. 仕様**(1) 製品タイプ**

製品番号	備考
M1658A	20個

【使用目的又は効果】

生体情報モニタ IntelliVueは、組み込み機能キット、モジュール、他の装置を利用していくつかのモニタリングパラメータを収集し、ベッドや患者別に表示するユニットをいう。ベッドサイドユニットは、セントラルモニタと接続することができるが、単独でも動作可能である。モニタリングパラメータには心電図、血圧、体温、心拍手量、呼吸ガス等があり、加えて脳派測定・解析機能を有し、かつ重要パラメータである不整脈検出・無呼吸検出を行う。

【使用方法等】

1. 本品のルアーロックコネクタ 1 を、エアウェイアダプタ経由で患者回路に接続する。
2. 本品のルアーロックコネクタ 2 を、ウォータートラップのサンプルチューブ・コネクタに接続する。
3. 本品と併用するエアウェイアダプタ、モニタ等の取扱説明書に従い、呼気のサンプルングを行う。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続は確実にすること。[漏れがあると、患者のサンプルガスが周囲の空気と混じって誤った測定結果を招く原因となるおそれ]
2. 本品使用の際は、ねじれたチューブを使用しないこと。[詰まり、漏れが生じるおそれ]

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

取扱説明書を必ず確認してください。