

機械器具（21）内臓機能検査用器具
 高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ（33586003）
「生体情報モニタ IntelliVue」の付属品
 ウォータートラップ

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



サンプルチューブ
コネクタ

2. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
M1657B	25個

【使用目的又は効果】

生体情報モニタ IntelliVueは、組み込み機能キット、モジュール、他の装置を利用していくつかのモニタリングパラメータを収集し、ベッドや患者別に表示するユニットをいう。ベッドサイドユニットは、セントラルモニタと接続することができるが、単独でも動作可能である。モニタリングパラメータには心電図、血圧、体温、心拍手量、呼吸ガス等があり、加えて脳派測定・解析機能を有し、かつ重要パラメータである不整脈検出・無呼吸検出を行う。

【使用方法等】

1. 麻酔ガスモジュールのウォータートラップソケットに、本品をゆっくりと差し込む。
2. 麻酔ガスモジュールの電源スイッチを押して、電源を入れる。モジュールのウォームアップが開始され、この間に患者との接続を行う。
3. サンプルチューブの一端を、本品のサンプルチューブコネクタに接続する。サンプルチューブのもう一方の端を、エアウェイアダプタ経由で患者に接続する。
4. 接続先機器の取扱説明書に従い、測定を開始する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続は確実にすること。[漏れがあると、患者のサンプリング・ガスが周囲の空気と混じって誤った測定結果を招く原因となる]
2. 新しいウォータートラップと交換するとき、両方のマニホールド・シールが麻酔ガスモジュール本体に残っていることを確認すること。[シールが取れると周囲の空気と混じったサンプリング・ガスが測定されるおそれ]
3. 最低2週間ごと、またはウォータートラップに水がいっぱいになった時点で交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9時～18時

製造業者：フィリップス メディツィン システムボブリンゲン社
 (Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH)

国 名：ドイツ連邦共和国

取扱説明書を、必ず確認してください。