

機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器
単回使用呼吸回路用コネクタ（34838012）
ストレートサンプルライン

再使用禁止

【警告】

使用方法

1. 本品は、レーザー、電気メス、または高温に直接さらすと発火のおそれがある。頭部または頸部に対してレーザーや電気外科装置を使用した処置または高温になる処置を施す場合は、本品に引火しないよう注意すること。〔引火のおそれ〕

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 本品をガスや液体でフラッシュしないこと。〔接続先機器の破損のおそれ〕
2. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。
3. 閉鎖式吸引システムと併用する場合は、本品を吸引カテーテルと気管内チューブの間に設置しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 構成


本品は、呼吸回路を接続するコネクタ部分と呼吸をサンプリングするためのチューブ部分から構成される。

2. 外観

〔一般回路用〕

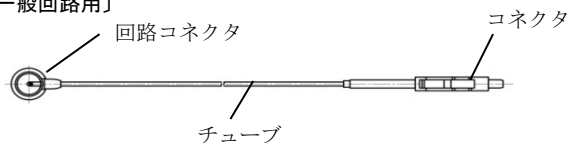

〔加湿回路用〕

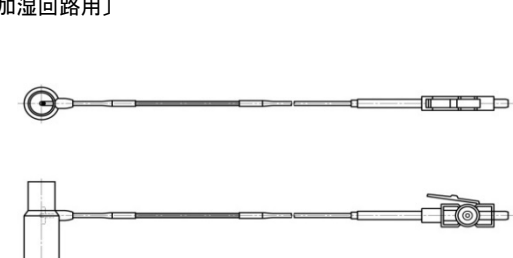

3. 仕様

(1) 製品タイプ

**	製品番号	用途	備考
	M2768A	一般回路用（ET＞4.0mm）	10 本
	<u>989803206711</u>		
	989803144531		
	<u>989803206721</u>	一般回路用（ET≤4.0mm）	
	M2776A	一般回路用サンプルライン	
	<u>989803206751</u>		
	M2772A	加湿回路用（ET＞4.0mm）	
	<u>989803206731</u>		
	M2773A	加湿回路用（ET≤4.0mm）	
	<u>989803206741</u>		
	M2777A	加湿回路用サンプルライン	
	<u>989803206761</u>		

※ET：気管内チューブ

4. 原理

回路コネクタが ISO5336-1 の 5 により標準化されているため、適合する呼吸回路に嵌合し、呼吸回路のコンポーネント同氏を接続する。

【使用目的又は効果】

本品は、呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いる。

【使用方法等】

1. コネクタ（機器接続側）を二酸化炭素モジュール等の機器に接続する。
2. 回路コネクタのオス端を呼吸回路（機器側）の Y ピースのメス端に接続する。
3. 回路コネクタのメス端に気管内チューブを接続する。
閉鎖式サクションシステムの場合は、システムの換気コネクタに回路コネクタのメス端を接続する。
4. 本品と併用する呼吸回路、二酸化炭素モジュール等の機器の取扱方法に従い、呼吸のサンプリングを行う。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 接続は確実に行うこと。
2. チューブがねじれたり、折り曲がらないように注意すること。

詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

取扱説明書を、必ず確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

* 製造業者：レスピロニクス ノバメトリクス LLC 社
(Respironics Novametrix, LLC)

* 国 名：アメリカ合衆国