


機械器具（06）呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
（再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 37705000）

「REMstar Auto System One 60 シリーズ」の付属品 ヒートッドチューブ


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

** タイプ A

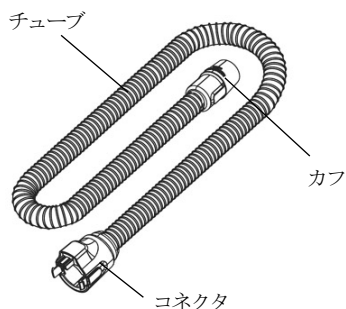

** タイプ B

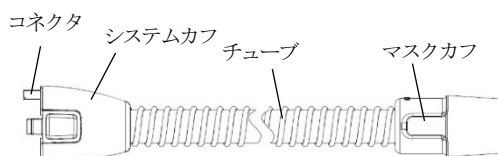

・寸法

全長：1,830mm、チューブ内径：15mm

・適用機種

本装置が接続可能な機種は以下のとおり。

販売名	承認番号
REMstar Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00268000
BiPAP Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00448000
REMstar Pro System One 60 シリーズ	22500BZX00477000
BiPAP autoSV Advanced System One 60 シリーズ	22600BZX00073000
BiPAP A40 システム シルバーシリーズ	22600BZX00347000
OmniLab システム	22600BZX00391000
BiPAP ハイブリッド A30	22900BZX00317000

タイプ B は以下の装置にも接続可能。

販売名	承認番号又は認証番号
ドリームステーション Auto	30200BZX00299000
ドリームステーション Pro	22800BZX00314000
ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000

【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器（CPAP 装置、BiPAP 装置含む）から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いる呼吸回路である。加温を制御するために加温加湿器 HT と一緒に使用する。

【使用方法等】

1. コネクタを加温加湿器 HT へ接続する。
2. 逆側のカフをマスク等へ接続する。
3. 人工呼吸器を操作し、マスクを介し患者へ空気又は酸素を含むガスを送込する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・加温加湿器接続部（コネクタ）を水に浸さない。

【保守・点検に係る事項】

1. クリーニング

- ・初回の使用前及び週 1 回、温水中性洗剤を溶かした溶液の中で洗浄し、十分にすすいだ後、自然乾燥させる。
- ・損傷や摩耗（亀裂、ひび割れ、裂け目、穴など）がないか点検する。

2. 消毒

- 複数の患者に使用する場合は、クリーニング終了後に、以下の方法により、最大 60 回消毒することができる。
- ・熱消毒（75℃ ± 2℃の熱水に 30 分間浸す）
 - ・消毒剤：ディスポーバ® 消毒液 0.55%（Cidex OPA）を使用

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

** <緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

地域支店

※地域支店の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

** 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー
アメリカ合衆国