

機械器具 (06) 呼吸補助器  
管理医療機器  
単回使用呼吸回路用コネクタ (34838012)  
**Invivo サンプリングライン**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

**使用方法**

1. 本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9時～18時


\*\* 製造業者：ウエストメッド インク

(Westmed, Inc.)

国 名：アメリカ合衆国

**【形状・構造及び原理等】**

1. 外観

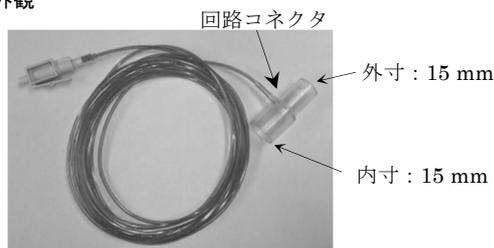

2 仕様

製品タイプ

製品番号	用途	備考
989803183291	成人用	20本
989803185381		100本

3. 作動原理

回路コネクタが ISO 5356-1 の 5 により標準化されているため、適合する呼吸回路に嵌合し、呼吸回路のコンポーネント同士を接続する。

**【使用目的又は効果】**

呼吸回路とフェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いるものである。

**【使用方法等】**

1. コネクタ (機器接続側) を多項目モニタ等の機器に接続する。
2. 回路コネクタのオス端を呼吸回路 (機器側) の Y ピースのメス端に接続する。
3. 回路コネクタのメス端に気管内チューブを接続する。閉鎖式サクションシステムの場合は、システムの換気コネクタに回路コネクタのメス端を接続する。
4. 本品と併用する呼吸回路、多項目モニタ等の機器の取扱い方法に従い、呼気のサンプリングを行う。

**<使用方法等に関連する使用上の注意>**

1. 使用前に包装、製品に亀裂、破損等の異常がないことを確認し、異常が認められた場合には使用しないこと。
2. 本品をねじったり、曲げたりしないこと。
3. クリーニングや消毒はしないこと。

使用上の注意の詳細については、本品と併用する呼吸回路、多項目モニタ等の機器の取扱説明書も参照すること。

取扱説明書を、必ず確認してください。