

機械器具（06）呼吸補助器


高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
（人工呼吸器フィルタ 14352000）

「ドリームステーション Auto」の付属品 バクテリアフィルタ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び各部の名称

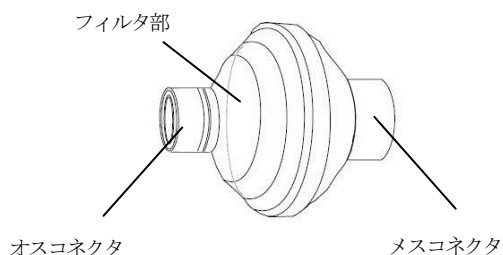

2. 寸法

オスコネクタ：内径 15 mm／外径 22 mm

メスコネクタ：内径 22 mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

地域営業所・出張所・駐在

** ※地域営業所・出張所・駐在の連絡先は検索サイトより

「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア 営業所」でご検
索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

製造業者：Respironics, Inc.

レスピロニクス インク

アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

本品は、CPAP 装置又はバイレベル装置の呼吸回路を介して患者や使
用者、装置へ粒子および微生物が侵入するのを防止するために用いる。

【使用方法等】

- ドリームステーションシリーズ本体またはドリームステーシ
ョン用加温加湿器の送気口にバクテリアフィルタのメスコネクタ
を接続する。
- バクテリアフィルタのオスコネクタに呼吸回路（ヒートドチュー
プ及びドリームステーション用ヒートドチューブを除く）を接続
する。

・適用機種

本品が接続可能なドリームステーションシリーズの機種は以下のと
おり。

*	販売名	承認番号又は認証番号
	ドリームステーション Auto	22800BZX00007000
	ドリームステーション Pro	22800BZX00314000
	ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない。]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- ・フィルタは洗浄せず、塞がったときには交換する。（一人の患者用）

取扱説明書を必ずご参照ください