


機械器具 (06) 呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
(再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 37705000)

「ドリームステーション Auto」の付属品 ドリームステーション用 12mm チューブ

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- ドリームステーション用 12mm チューブ

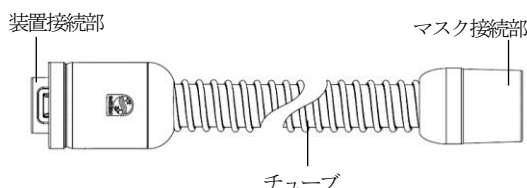

- 12mm チューブ用装置コネクタ（必要に応じて使用する）



- 12mm チューブ用マスクコネクタ（必要に応じて使用する）



2. 仕様

- ドリームステーション用 12mm チューブ

動作条件	温度：5℃～40℃ 相対湿度：15%～95%（結露なきこと）
寸法	全長：1,875mm、マスク接続部：φ17mm（内径）、チューブ：φ12mm（内径）

【使用目的又は効果】

本品は、CPAP 装置又はバイレベル装置から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いる呼吸回路である。

【使用方法等】

- 12mm チューブ装置コネクタをドリームステーション用 12mm チューブの装置接続部に接続した後、本体又はドリームステーション用加温加湿器の送気口に接続する。（回路方向変換アダプタに接続する場合は、12mm チューブ装置コネクタを接続せず、ドリームステーション用 12mm チューブの装置接続部を直接回路方向変換アダプタの送気口に接続する。）
- ドリームステーション用 12mm チューブのマスク接続部をマスクに接続する。（必要に応じて 12mm チューブマスクコネクタをドリームステーション用 12mm チューブのマスク接続部に接続する。）

- 接続機器本体を操作し、マスクを介し患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。

本品が接続可能な機器を以下に例示する。

構成品		認証番号
一般的名称	販売名	
持続的自動気道陽圧ユニット	ドリームステーション Auto	22800BZX00007000

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 呼吸回路を引っ張ったり、伸ばしたりしない。〔呼吸回路のリークを起こす原因となる。〕
- 接続機器本体のソフトウェアバージョンが 1.1.0 又はそれ以降であることを確認する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品は一人の患者のみに使用する。〔本品は滅菌できない。〕

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ドリームステーション用 12mm チューブ及び 12mm チューブ用マスクコネクタ：初めて使用する前及び毎日洗浄を行う。本体から外した後、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗浄し、十分にすすいでから、自然乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
＜緊急連絡先＞
 - 平日 9:00～17:30
地域営業所・出張所・駐在
- * ※地域営業所・出張所・駐在の連絡先は検索サイトより
「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア 営業所」で
検索下さい。
 - 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日
機器安全センター 0120-633881
製造業者：Respironics, Inc.
レスピロニクス インク
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください