


機械器具（06）呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
(再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 37705000)

「ドリームステーション Auto」の付属品 ドリームステーション用スタンダードチューブ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び各部の名称

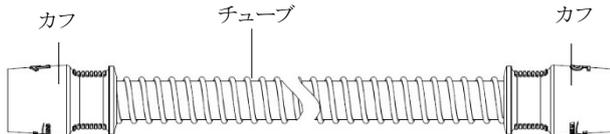

2. 寸法

全長：1,830mm、カフ内径：21mm、チューブ内径：15mm

【使用目的又は効果】

本品は、CPAP 装置又はバイレベル装置から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いる呼吸回路である。

【使用方法等】

- カフをドリームステーションシリーズ本体または加温加湿器の送気口に接続する。
- 逆側のカフをマスクに接続する。
- ドリームステーションシリーズ本体を操作し、マスクを介し患者へ空気又は酸素を含むガスを送入する。

** ・適用機種

本品が接続可能なドリームステーションシリーズの機種は以下のとおり。

販売名	承認番号
ドリームステーション Auto	30200BZX00299000
ドリームステーション Pro	22800BZX00314000
ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000
ドリームステーション BiPAP autoSV	30100BZX00195000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 呼吸回路を引っ張ったり、変形させたり、負荷を加えない。
[呼吸回路の破損やリークを起こす原因となる]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない]

【保守・点検に係る事項】

** <使用者による保守点検事項>

- 初めて使用する前に洗浄し、その後は週1回洗浄を行う。

- 複数の患者が装置と加温加湿器を使用する場合、患者ごとにチューブを廃棄する。
- 本体からチューブを外した後、刺激の少ない食器用洗剤をぬるま湯で薄めた溶剤中に完全に浸して、ていねいに洗浄する。
- ぬるま湯 3.8L に対し、液体食器洗い洗浄剤は小さじ 1 (5ml) を 3 分間使用する。
- 途中でチューブを優しく上下に動かし、チューブやコネクタに付着した物質を浮かせて、ある程度除去する。
- 水道水で少なくとも 1 分間完全に洗い流し、チューブとコネクタから残った石鹸を全て取り除く。
- 直射日光の当たらない場所で自然乾燥させる。チューブに破損や摩耗がないか点検し、必要に応じて廃棄・交換する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

- 平日 9:00～17:30

** 地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

- 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー
アメリカ合衆国