

機械器具（06）呼吸補助器


高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
(人工呼吸器フィルタ 14352000)

「ドリームステーション Auto」の付属品
バクテリアフィルタ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び各部の名称

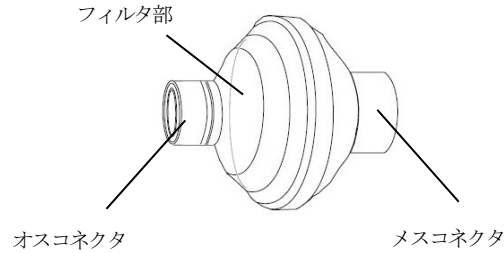

2. 寸法

オスコネクタ：内径 15 mm／外径 22 mm

メスコネクタ：内径 22 mm

【使用目的又は効果】

本品は、CPAP 装置又はバイレベル装置の呼吸回路を介して患者や使用者、装置へ粒子および微生物が侵入するのを防止するために用いる。

【使用方法等】

- ドリームステーションシリーズ本体またはドリームステーション用加温加湿器の送気口にバクテリアフィルタのメスコネクタを接続する。
- バクテリアフィルタのオスコネクタに呼吸回路（ヒータッドチューブ及びドリームステーション用ヒータッドチューブを除く）を接続する。

** ・適用機種

本品が接続可能なドリームステーションシリーズの機種は以下のとおり。

販売名	承認番号
ドリームステーション Auto	30200BZX00299000
ドリームステーション Pro	22800BZX00314000
ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000
ドリームステーション BiPAP autoSV	30100BZX00195000

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない]

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ・フィルタは洗浄せず、塞がったときには交換する。（一人の患者用）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

＜緊急連絡先＞

- 平日 9:00～17:30

** 地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

- 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー
アメリカ合衆国