


機械器具 (06) 呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット 37234000
(再使用可能な呼吸回路用コネクタ 34838022)

「ドリームステーション Auto」の付属品 回路方向変換アダプタ


【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- 回路方向変換アダプタ
<表面>

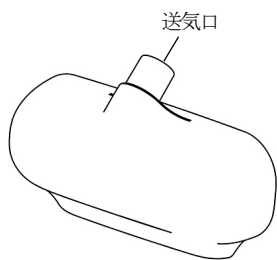

<装置接続面>

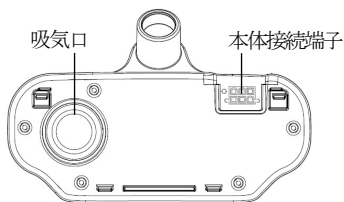

2. 仕様

動作条件温度：5℃～40℃

相対湿度：15%～95%（結露なきこと）

【使用目的又は効果】

本品は、上部の送気口に呼吸回路を接続することで、本体の正面に向かって呼吸回路を配置できるようにする装置である。

【使用方法等】

- 本品を機器の背面に接続する。

本品が接続可能な機器を以下に例示する。

構成品		承認番号
一般的名称	販売名	
持続的自動気道陽圧ユニット	ドリームステーション Auto	30200BZX00299000

- ドリームステーション用スタンダードチューブ又は以下に例示される本品と組み合わせて使用可能な呼吸回路を本品の送気口に接続する。あるいは、ドリームステーション用 12mm チューブを本品の送気口に接続する。（必要に応じて 12mm チューブマスクコネクタをドリームステーション用 12mm チューブのマスク接続部に接続する）

本品と組み合わせて使用可能な呼吸回路を以下に例示する。

構成品			承認番号又は 認証番号
一般的名称	販売名	構成品名	
成人用人工呼吸器	BiPAP A40 システム シルバーシリーズ	パフォーマンスチューブ 22mm	22600BZX00347000
再使用可能な人工呼吸器呼吸回路	パフォーマンスチューブ	パフォーマンスチューブ 15mm	224ADBZI00038000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 接続機器本体のソフトウェアバージョンが 1.1.0 又はそれ以降であることを確認する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は一人の患者のみに使用する。[本品は滅菌できない]

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- 水と中性洗剤に軽く浸した布で外面を拭き、十分に乾燥させる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30

地域支店

※地域支店の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリープ&レスピラトリケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降～翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

* 製造業者：PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー
アメリカ合衆国