


機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

誘導コード L-CABLE-864

【禁忌・禁止】

- ・勝手に分解したり、改造しないでください。
- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあります。]
- ・指定機器以外への接続は、行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

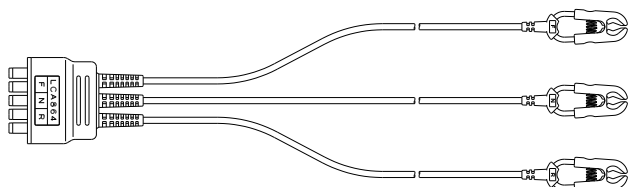

(L-CABLE-864)

No.	形 式	備 考
1	L-CABLE-864	クリップタイプ

＜仕様＞

項目	仕様
導通抵抗	1Ω以下
耐電圧	AC 1,500V 1分間

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

- 電極と機器本体コードを接続する導線。電極を含まない。

【使用方法等】

1. 機器本体側コードのコネクタ部と誘導コード L-CABLE-864 のコネクタ部を接続する。
2. 誘導コード L-CABLE-864 の先端部に電極を取り付ける。
3. 電極を被験者に取り付け、人体の電位変動を誘導する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 改造は、絶対に行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]
- 本品を電極や機器本体等からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持ってはずして下さい。[断線のおそれがあります]
- 本品は、薬液や水に触れないようにし、濡れた状態では使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

使用温度： 10～40℃

使用湿度： 30～90%

＜使用期間等＞

耐用期間： 2年[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭して下さい。
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用下さい。

【包装】

1本/1梱包 もしくは 組み合わせセット/1梱包

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者・製造業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

電話：(042)560-5661