

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

ECGケーブル

【警告】

<適用対象(患者)>


患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように、機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

【禁忌・禁止】

- ・清掃にシンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・MRI でのご使用はできません。[誘導起電力による局所的な発熱で被検者が火傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**構成品と種類

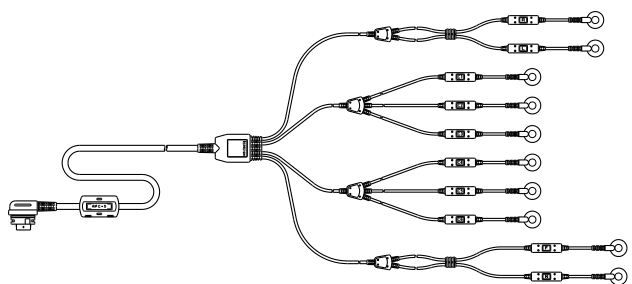

□図は DSPRC10H)

**種類

No.	品 番	備 考	包装
1	DSPRC3H	3 電極 ホックタイプ	1 本入
2	DSPRC4H	4 電極 ホックタイプ	1 本入
3	DSPRC10H	10 電極 ホックタイプ	1 本入
4	DSPRC3P	3 電極 ピンタイプ	1 本入
5	DSPRC4P	4 電極 ピンタイプ	1 本入
6	DSPRC10P	10 電極 ピンタイプ	1 本入

仕様

項目	仕様
導通抵抗	10k Ω $\pm$ 10%
絶縁抵抗	DC1000V 100M Ω 以上

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

1. 被検者に取り付けられた電極に本品を接続する。
2. 本品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続する。
3. 心電図を記録する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品を電極や機器本体からはずす際は、コードを持たずにコネクタを持って引き抜いてください。[断線のおそれがあります。]
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。[重大な事故の原因となることがあります。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

使用温度： 10～40℃

使用湿度： 30～85%

**耐用期間

1 年 (自主基準) 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は、水またはぬるま湯に湿らせたガーゼ、または酒精綿で清拭してください。

**・本品は防水仕様ではありません。流水や水没させての洗浄は行わないでください。

**・シンナー、トルエンなどの有機溶剤は使用しないで下さい
コードを拭く際は、接続コネクタ等からコードを引っ張るように拭かず、コード部を握って拭いてください。[コード被覆の劣化を促進し、破損のおそれがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん液等の消毒液はコード被覆の劣化を促進します。]
・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フタミ・エム・イー工業株式会社

TEL：042-560-5661 FAX：042-560-8934